




Veuillez lire attentivement les consignes avant de procéder au montage. Le non-respect des consignes de montage peut s'avérer dangereux pour le technicien et/ou l'utilisateur final et pourrait annuler la garantie. Si vous avez des questions concernant le R90, veuillez contacter le service d'assistance technique de Sunrise Medical au +1 (800) 333-4000.

Sunrise Medical n'est pas responsable de la compatibilité et de l'alignement avec les fauteuils d'autres marques et n'est pas tenu de mettre à jour les informations de compatibilité pour les produits d'autres marques. Ce guide fournit des recommandations concernant le matériel de montage requis pour ces fauteuils roulants spécifiques, mais il est essentiel d'évaluer la configuration du fauteuil afin de garantir une compatibilité totale avec le R90. Ces instructions ont été rédigées à partir des informations disponibles sur les fauteuils d'autres marques au moment de la publication

**Fauteuils roulants Motion Composite :**  
Helio A7, Helio C2, Helio, Veloce, et KIDS

**Taille de l'adaptateur pliant R90 :** Moyenne

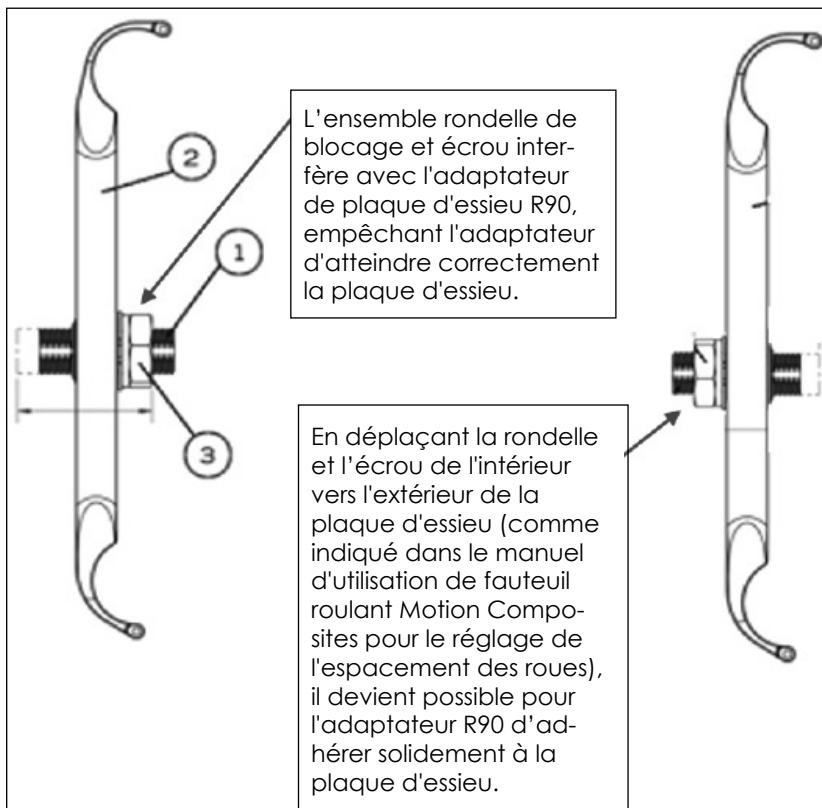

La section 8.11.5 du manuel d'utilisation du fauteuil roulant pliant Motion Composite fournit des instructions sur la manière de déplacer la rondelle et l'écrou de l'intérieur vers l'extérieur de la plaque d'essieu.

Source : 0070757E-00 MC Fauteuil roulant pliant manuel, Date de révision 2025-08-06. Manuel d'utilisation disponible sur : [www.motioncomposites.com](http://www.motioncomposites.com)

### 8.11.5 RÉGLAGE DE L'ESPACEMENT DES ROUES ARRIÈRE

- Les roues arrière peuvent être réglées latéralement en repositionnant le récepteur d'essieu (1) sur les plaques de montage (2).
- Desserrez les écrous (3) sur les récepteurs d'essieu (1).
- Positionnez les écrous (3) pour régler l'espacement.
- Serrez fermement les écrous (3).
- L'écrou peut être déplacé d'un côté à l'autre pour une plus grande amplitude de réglages.



### AVERTISSEMENT ADRESSÉ AU VENDEUR ET AU TECHNICIEN

À l'attention des détaillants et des techniciens qualifiés : veuillez impérativement prendre connaissance du manuel d'utilisation avant d'utiliser le R90 ou d'effectuer des opérations d'entretien. Si vous avez des doutes concernant les instructions et avertissements contenus dans le manuel d'utilisation du R90, contactez le service technique de Sunrise Medical avant d'utiliser ce dispositif R90 ou d'effectuer des opérations d'entretien. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages et/ou des blessures.

**Vous trouverez de plus amples informations et d'autres mises en garde dans le manuel d'utilisation ou sur :**  
[www.SunriseMedical.com](http://www.SunriseMedical.com).