




Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar el montaje. El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede provocar lesiones al técnico y/o al usuario final y puede anular la garantía. Si tiene alguna pregunta sobre el R90, llame al servicio de soporte técnico de Sunrise Medical al +1 (800) 333-4000.

Sunrise Medical no se responsabiliza por la compatibilidad y alineación con sillas de terceros ni tiene la obligación de actualizar la información de compatibilidad con productos de terceros. Esta guía proporciona recomendaciones sobre los accesorios de montaje necesarios para estas sillas de ruedas específicas; sin embargo, resulta imprescindible evaluar la configuración de la silla para garantizar la plena compatibilidad con el R90. Este manual se ha elaborado con la información sobre las sillas de terceros disponible en el momento de su publicación.

Sillas de ruedas compuestas:

Helio A7, Helio C2, Helio, Veloce, y KIDS

Tamaño del adaptador plegable - R90: Medio

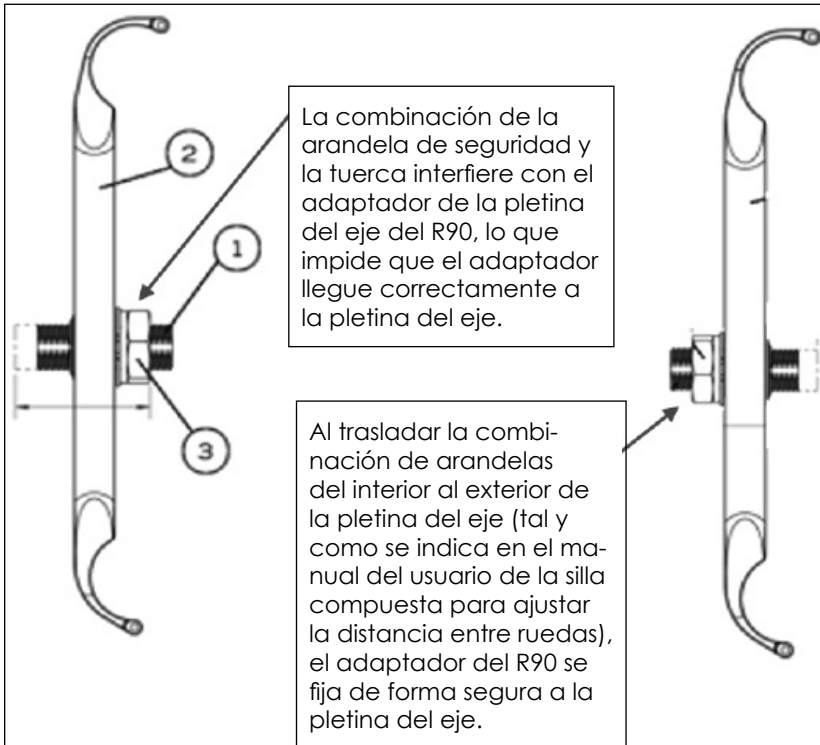

La sección 8.11.5 del Manual del usuario de la silla de ruedas plegable compuesta proporciona instrucciones sobre cómo mover la arandela y la tuerca desde el interior hacia el exterior de la pletina del eje.

Fuente: Manual de la silla de ruedas plegable 0070757E-00 MC; Fecha de revisión 06/08/2025. Acceda al manual del usuario en: www.motioncomposites.com

8.11.5 AJUSTE DEL ESPACIO ENTRE LAS RUEDAS TRASERAS

- Las ruedas traseras se pueden ajustar lateralmente reposicionando el receptor del eje (1) en las pletinas de montaje (2).
- Afloje las tuercas (3) de los receptores del eje (1).
- Coloque las tuercas (3) para ajustar la separación.
- Ajuste firmemente las tuercas (3).
- Se puede cambiar la tuerca de un lado a otro para realizar más ajustes.



ADVERTENCIA PARA EL DISTRIBUIDOR/TÉCNICO

Atención distribuidores y técnicos cualificados: no utilizar o reparar el R90 sin antes de haber leído el manual de instrucciones. Si no entiende las instrucciones y advertencias de este manual del usuario del R90, comuníquese con el departamento de servicio técnico de Sunrise Medical antes de utilizar o realizar tareas de mantenimiento en el dispositivo R90. De lo contrario, podría ocasionar lesiones o daños.

Disponde de más información y advertencias importantes en el manual de instrucciones del dispositivo o en: www.Sunrise-Medical.com.