

Zippie® Sphynx

Au Fournisseur: Ce manuel doit être remis à l'utilisateur de ce fauteuil roulant.

À l'Usager: Veuillez lire tout le manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Manuel
d'instructions

P/N 252843 Rev. E

Zippie® Sphynx

Manuel d'utilisation

SUNRISE MEDICAL® EST À VOTRE ÉCOUTE

Merci d'avoir choisi un® fauteuil Zippie®. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et commentaires sur ce manuel, sur la sécurité et la fiabilité de votre fauteuil et sur la prestation de service de votre détaillant Sunrise Medical agréé. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante ou à nous appeler au numéro indiqué ci-dessous :

SUNRISE MEDICAL (US) LLC

Customer Service Department
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122, USA
(800) 333-4000



www.SunriseMedical.com/register

Veillez enregistrer votre fauteuil roulant et nous prévenir si vous changez d'adresse. Cela nous permettra de vous faire parvenir diverses informations en lien avec la sécurité, les options et nouveaux produits, afin de vous faire apprécier davantage l'utilisation de votre appareil.

Vous pouvez également enregistrer votre fauteuil roulant sur :
www.SunriseMedical.com/register

LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS

Votre détaillant agréé connaît mieux que quiconque votre fauteuil roulant et il pourra répondre à la plupart de vos questions concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien.

Remplissez le formulaire ci-dessous et conservez-le précieusement. Il pourra vous servir ultérieurement.

Détaillant : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Numéro de série : _____ Date d'achat : _____

AUTRES INFORMATIONS UTILES

Tous les composants de ce matériel sont exempts de caoutchouc naturel (latex).



INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT ET AU RECYCLAGE

Lorsque le produit atteint la fin de son cycle de vie, veuillez l'emmener aux points de ramassage ou de recyclage agréés prévus à cet effet par les autorités locales. Ce produit a été fabriqué à partir de différents matériaux. Votre produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers courants. Votre produit doit être mis au rebut conformément aux réglementations et lois locales en vigueur. La plupart des matériaux utilisés à la fabrication de ce produit sont recyclables. Le ramassage et le recyclage de votre produit au moment de la mise au rebut contribueront à la préservation des ressources naturelles et garantiront une élimination respectueuse de l'environnement.

Assurez-vous que vous êtes le propriétaire légal du produit avant de disposer de ce produit conformément aux réglementations ci-dessus.

2.0 SOMMAIRE

1.0 INTRODUCTION.....	2	7.0 AVERTISSEMENTS : COMPOSANTS ET OPTIONS.....	11
2.0 SOMMAIRE.....	3	A. ACCOUDOIRS.....	11
3.0 VOTRE FAUTEUIL ET SES COMPOSANTS.....	4	B. COUSSIN ET SIÈGE EN TOILE.....	11
4.0 AVIS – À LIRE AVANT UTILISATION.....	4	C. FIXATIONS.....	11
A. CHOISIR LE BON FAUTEUIL ET LES OPTIONS DE SÉCURITÉ.....	4	D. REPOSE-PIEDS.....	11
B. CONSULTEZ CE MANUEL RÉGULIÈREMENT.....	4	E. SANGLE DE MAINTIEN (en option).....	11
C. AVERTISSEMENTS.....	4	F. POIGNÉES DE POUSSÉE.....	11
5.0 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.....	5	G. ESSIEUX À LIBÉRATION RAPIDE.....	11
A. CHARGE MAXIMALE.....	5	H. BLOQUE-MOYEU DES ROUES ARRIÈRE.....	12
B. USAGE PREVU.....	5	I. SYSTÈMES D'ASSISE MODIFIÉS.....	12
C. ACCOMPAGNATEURS ET PERSONNEL SOIGNANT.....	5	J. GARNITURE DU SIÈGE ET DU DOSSIER.....	12
D. ACCESSOIRES.....	5	K. POIGNÉE.....	12
E. SE FAMILIARISER AVEC SON FAUTEUIL.....	5	L. TABLETTE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE ET BATTERIE...	12
F. RÉDUIRE LE RISQUE D'ACCIDENT.....	5	M. CROCHET POUR ACCESSOIRES.....	12
G. LISTE DE CONTRÔLE.....	5	8.0 UTILISATION ET ENTRETIEN.....	13
H. MODIFICATIONS ET RÉGLAGES.....	5	A. INTRODUCTION.....	13
I. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES.....	5	B. CONSEILS D'ENTRETIEN.....	13
J. TERRAIN.....	6	C. CONSEILS DE NETTOYAGE.....	13
K. UTILISATION SUR ROUTE.....	6	D. TABLEAU DE MAINTENANCE.....	13
L. SÉCURITÉ A BORD D'UN VÉHICULE MOTORISÉ.....	6	E. TABLEAU DE DÉPANNAGE.....	13
M. BESOIN D'AIDE ?.....	6	F. MONTAGE ET DÉMONTAGE DES ROUES ARRIÈRE.....	14
N. DANGER D'ÉTOUFFEMENT.....	6	G. BLOQUE-MOYEU.....	14
O. PINCEMENT DES DOIGTS.....	6	H. ACCOUDOIRS RABATTABLE AVEC VERROUILLAGE.....	14
6.0 AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ : CHUTES ET BASCULEMENTS.....	7	I. REPOSE-PIEDS, REPOSE-JAMBES ET PALETTES.....	14
A. POINT D'ÉQUILIBRE.....	7	J. GARNITURE DE DOSSIER.....	15
B. S'HABILLER OU CHANGER DE VÊTEMENTS.....	7	K. GARNITURE RÉGLABLE.....	15
C. OBSTACLES.....	7	L. ASSISE ET TOILE DU SIÈGE.....	16
D. DÉCOLLAGE DES ROUES AVANT.....	7	M. RÉGLAGE DE L'ANGLE D'INCLINAISON (dossier par rapport au siège).....	16
E. SE METTRE EN EXTENSION OU SE PENCHER.....	7	N. PLIAGE ET DÉPLIAGE.....	17
F. RECULER.....	7	O. POIGNÉES PLIABLES ET RÉGLABLES.....	18
G. ESCALATORS.....	8	P. MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA CAPOTE.....	18
H. RAMPES D'ACCÈS, PENTES ET INCLINAISONS.....	8	Q. CONSEILS D'ENTREPOSAGE.....	18
I. TRANSFERT.....	9	R. INSPECTION.....	18
J. TROTTOIRS ET MARCHES.....	9	9.0 RÉGLAGES ET ENTRETIEN RÉALISÉS PAR LE DÉTAILLANT.....	19
K. MONTER UN TROTTOIR OU UNE MARCHÉ SIMPLE.....	10	A. RÉVISION EFFECTUÉE PAR UN DÉTAILLANT AGRÉÉ.....	19
L. DESCENDRE UN TROTTOIR OU UNE MARCHÉ SIMPLE.....	10	B. CONSEILS D'ENTRETIEN.....	19
M. ESCALIERS.....	10	C. NETTOYAGE.....	19
N. MONTER DES ESCALIERS.....	10	D. RÉGLAGE DE L'ÉCROU DE L'ESSIEU DE ROUE.....	19
O. DESCENDRE DES ESCALIERS.....	10	E. ACCOUDOIRS RABATTABLE AVEC VERROUILLAGE.....	20
		F. POTENCES ET REPOSE-PIEDS INCLINABLES.....	20
		G. DOSSIERS.....	21
		H. RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA SANGLE D'ASSISE.....	22
		I. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE.....	24
		J. RÉGLAGE DE L'ANGLE DE BASCULEMENT (siège par rapport au sol).....	25
		10.0 GARANTIE DE SUNRISE LIMITED.....	27

ZIPPIE SPHYNX

1. Poignée de poussée
2. Bouton de réglage d'inclinaison de la poignée de poussée
3. Levier à loquet (Inclinaison et pliage)
4. Dossier
5. Roue arrière à libération rapide et pneu
6. Fourche de la roue avant
7. Roue avant et pneu
8. Palette
9. Repose-jambe à amovible
10. Cadre d'assise

REMARQUE : Certaines caractéristiques décrites peuvent ne pas être disponibles sur certains fauteuils ou en conjonction avec d'autres options. Pour toute information, n'hésitez pas à contacter votre détaillant agréé Sunrise Medical. Il pourra vous fournir des informations sur les accessoires disponibles.

**4.0 AVIS – À LIRE AVANT UTILISATION****A. CHOISIR LE BON FAUTEUIL ET LES OPTIONS DE SÉCURITÉ**

Sunrise Medical propose une vaste gamme de fauteuils roulants afin de répondre aux divers besoins des enfants. Cependant, le choix final quant au type de dispositif, aux options, et aux réglages repose exclusivement sur votre décision et sur les conseils du professionnel de santé qui vous suit. Le choix du bon dispositif et de la configuration optimale dépend des facteurs suivants :

1. Le handicap de l'enfant, sa force, son équilibre, sa coordination et les limites de ses capacités.
2. La nature des dangers que devrez surmonter lors de l'utilisation quotidienne du matériel de mobilité (chez vous et au travail) et dans les endroits où vous serez amené à l'utiliser.
3. Le besoin d'options pour votre sécurité et votre confort (comme les anti-basculants, les ceintures de positionnement ou les systèmes d'assise particuliers).

B. CONSULTEZ CE MANUEL RÉGULIÈREMENT

Avant d'utiliser votre fauteuil, vous et toutes les personnes susceptibles de vous assister devez lire ce manuel intégralement et respecter toutes les consignes. Lisez régulièrement les avertissements et les consignes contenus dans ce manuel jusqu'à ce que vous les ayez bien assimilés.

C. AVERTISSEMENTS ⚠

Le mot « Avertissement » fait référence aux risques ou pratiques dangereuses pouvant entraîner de graves blessures, voire être fatals, pour vous ou toute autre personne. Les « avertissements » sont classés en trois sections principales, comme suit :

1. 5.0 — AVERTISSEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL
Il s'agit d'une liste de contrôle de sécurité et d'un récapitulatif des risques dont vous devez être conscient avant d'utiliser votre fauteuil.
2. 6.0 AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ : CHUTES ET BASCULEMENTS
Vous vous familiariserez avec les pratiques sûres et fiables pour une utilisation de votre fauteuil en toute sécurité et apprendrez à éviter de tomber ou de basculer pendant l'utilisation quotidienne de votre fauteuil.
3. 7.0 - AVERTISSEMENTS – COMPOSANTS ET OPTIONS
Vous apprendrez à connaître les composants de votre fauteuil et à sélectionner les options vous assurant une sécurité accrue. N'hésitez pas à demander à votre détaillant Sunrise Medical agréé et au professionnel de santé qui vous suit de vous conseiller sur les meilleures options pour une utilisation sûre de votre fauteuil.

NOTE - Vous trouverez également des « Avertissements » dans d'autres parties de ce manuel. Il est impératif que vous respectiez toutes les consignes de sécurité indiquées dans ces sections À défaut de quoi, vous pourriez tomber, basculer ou perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

5.0 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

A. CHARGE MAXIMALE

AVERTISSEMENT

Ne dépassez JAMAIS la charge de poids maximale précisé par Sunrise Medical. Le charge de poids maximale indiquée par le fabricant correspond au poids combiné du patient et des composants du fauteuil. Si vous ne respectez pas cette limite de poids, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

Capacité de poids

Zippie Sphynx - 250 lbs/(113 kg)

B. USAGE PREVU

Le fauteuil roulant Zippie Sphynx vise à faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.

AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS ce dispositif à des fins autres que celles prévues par le fabricant.

1. Ce fauteuil n'est pas prévu pour être utilisé pendant des séances de musculation car il ne garantit pas la stabilité minimale requise pour ce genre d'exercice. La pratique de la musculation tout en étant assis à bord du fauteuil roulant a une incidence considérable sur la stabilité du fauteuil et pourrait le faire basculer.
2. NE prenez PAS appui debout sur le châssis du fauteuil.
3. NE laissez JAMAIS personne se mettre debout sur votre fauteuil ou utiliser votre fauteuil en guise de marchepied.
4. Ce fauteuil roulant ne peut avoir qu'un occupant à la fois.
5. La modification et l'utilisation non autorisées de pièces ou d'accessoires n'ayant pas été fournis ou approuvés par Sunrise Medical peut modifier la structure de votre fauteuil. Ceci aura pour effet d'annuler la validité de la de votre appareil en le rendant dangereux d'utilisation. Le non-respect de ces consignes peut endommager votre fauteuil et entraîner de graves blessures pour la personne qui utiliserait le fauteuil à des fins autres que celles prévues.

C. ACCOMPAGNATEURS ET PERSONNEL SOIGNANT

AVERTISSEMENT

Avant d'assister un utilisateur de fauteuil roulant, lisez attentivement tous les avertissements énoncés dans le présent manuel et suivez les consignes. Suite à l'entretien avec le professionnel de santé qui suit le patient, vous devrez apprendre les bons gestes et adopter les bonnes positions pour assister l'utilisateur du fauteuil roulant sans vous blesser.

1. Demandez au professionnel de santé qui suit l'enfant de vous apprendre les méthodes sûres et appropriées à vos capacités et à celles de l'enfant.
2. Pour éviter de vous faire mal au dos, adoptez une bonne position et les gestes adéquats lorsque vous soulevez ou inclinez votre enfant.
3. Lorsque vous descendez un trottoir ou une marche, descendez le fauteuil lentement et en souplesse.
4. Ne laissez JAMAIS votre enfant sans surveillance.
5. Lorsque vous effectuez des réglages sur le fauteuil, enclenchez toujours le bloc-moyeu pour éviter tout déplacement accidentel.

D. ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT

Toute modification ou utilisation non autorisée de pièces ou d'accessoires n'ayant pas été fournis ou approuvés par Sunrise Medical pourrait modifier la structure de votre fauteuil. Ceci aura pour effet d'annuler la validité de la de votre appareil en le rendant dangereux d'utilisation.

Voici quelques exemples de problèmes susceptibles de se produire :

1. L'utilisation de roues ou de pneus inadaptés pourrait entraîner des risques de chute ou de bascule pour l'utilisateur.
2. L'ajout d'un composant sur le châssis pourrait modifier l'intégrité structurelle du fauteuil.
3. La modification ou le démontage peut potentiellement créer une situation dangereuse et risquée pour l'utilisateur et/ou l'accompagnateur.

E. SE FAMILIARISER AVEC SON FAUTEUIL

AVERTISSEMENT

Chaque fauteuil est différent. Prenez le temps d'apprendre à bien le connaître avant de l'utiliser. Démarrez lentement, sans donner de coups brusques. Si vous avez l'habitude d'utiliser un autre fauteuil, démarrez prudemment en veillant à déployer la bonne force pour ne pas chuter, car vous risqueriez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

F. RÉDUIRE LE RISQUE D'ACCIDENT

AVERTISSEMENT

1. AVANT d'utiliser ce fauteuil, le professionnel de santé qui vous suit doit vous apprendre à l'utiliser en toute sécurité.
2. Entraînez-vous à vous pencher et à monter et descendre du fauteuil pour connaître les limites de vos capacités. Faites-vous aider jusqu'à ce que vous connaissiez bien toutes les circonstances susceptibles de vous faire tomber ou basculer et jusqu'à ce que vous sachiez comment les éviter.
3. Vous devez développer vos propres méthodes d'utilisation, adaptées à vos besoins et à vos capacités physiques.
4. N'essayez JAMAIS d'effectuer seul une nouvelle manœuvre. Consultez votre professionnel de santé pour obtenir des conseils et diminuer le risque de chute ou de basculement du fauteuil.
5. Apprenez à connaître les endroits où vous comptez utiliser votre fauteuil. Repérez les dangers et apprenez à les éviter.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

G. LISTE DE CONTRÔLE

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser votre fauteuil :

1. Vérifiez que le fauteuil avance sans gêne et que tous ses composants fonctionnent normalement. Vérifiez l'éventuelle présence de bruits, de vibrations et assurez-vous que rien ne freine votre fauteuil. Cela peut être un signe de fixations desserrées ou d'un problème mécanique.
2. Faites immédiatement réparer toute anomalie. Votre détaillant Sunrise Medical agréé peut vous aider à identifier et à régler le ou les problèmes.
3. Vérifiez que les deux essieux arrière à déclenchement rapide sont verrouillés. Lorsqu'ils sont verrouillés, les boutons d'essieu « sortent » complètement. Si elles ne sont pas verrouillées, les roues risquent de se détacher du fauteuil et de vous faire chuter.
4. Ne placez jamais l'enfant dans son fauteuil roulant avant d'avoir complètement déplié et enclenché ce dernier.
5. Utilisez toujours une ceinture pelvienne de positionnement.
6. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

H. MODIFICATIONS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT

1. Tout réglage ou modification apportée à la poussette exige en général d'effectuer d'autres modifications, À DÉFAUT de quoi votre fauteuil risquerait de basculer.
2. Contactez votre détaillant Sunrise Medical agréé AVANT de procéder à un quelconque réglage ou modification de votre fauteuil.
3. Toute modification non autorisée apportée par l'utilisateur, le détaillant ou toute autre personne, y compris l'utilisation de pièces tierces ou non approuvées par Sunrise Medical, peut avoir une incidence sur la structure du fauteuil. Ceci aura pour effet d'annuler la validité de la de votre appareil en le rendant dangereux d'utilisation.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

I. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

AVERTISSEMENT

1. Soyez d'autant plus vigilant si vous devez utiliser votre fauteuil sur une surface mouillée ou glissante. Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez de l'aide.
2. L'eau et l'humidité excessive risquent de faire rouiller votre fauteuil. Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser le fauteuil dans des conditions météorologiques extrêmes.
 - a. N'utilisez pas votre fauteuil sous la douche, dans une piscine ou dans d'autres espaces ayant de l'eau. La structure et les pièces de votre fauteuil ne sont pas étanches (de la rouille ou de la corrosion pourrait apparaître).
 - b. Évitez les lieux à humidité excessive. Par exemple, ne laissez pas votre fauteuil dans une salle de bain humide pendant que vous vous douchez.
 - c. Si votre fauteuil a pris l'eau ou si vous l'avez nettoyé, essuyez-le rapidement.
 - d. Évitez tout contact avec le sel ou les solutions salées susceptibles d'endommager le fauteuil.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.



J. TERRAIN**⚠ AVERTISSEMENT**

1. Sur la base des essais ANSI/RESNA réalisés, Sunrise Medical recommande l'utilisation de roulettes ayant un diamètre minimum de 5 pouces (127 mm) s'il est prévu que le fauteuil doit régulièrement franchir des obstacles allant jusqu'à un demi pouce (12,7 mm).
2. Votre fauteuil a été conçu pour une utilisation sur des surfaces fermes et planes telles que du béton, de l'asphalte, de la moquette et les sols en intérieur.
3. N'utilisez pas votre fauteuil dans le sable, sur un sol mou ou sur un terrain rocailleux.
4. En cas d'utilisation du fauteuil sur un terrain accidenté et non conforme à la description fournie ci-dessus, les vis et boulons risquent de se desserrer et d'endommager les roues et essieux, ce qui, à terme, représentera un risque de chute, de basculement ou de perte de contrôle du fauteuil pour l'utilisateur.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

K. UTILISATION SUR ROUTE**⚠ AVERTISSEMENT**

1. Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé sur la route. Évitez autant que possible de l'utiliser sur la route.
2. Il convient d'utiliser la poussette sur les trottoirs et de respecter la réglementation applicable aux piétons.
3. Soyez conscient des dangers que représentent les véhicules motorisés dans les parkings.
4. La nuit ou lorsque l'éclairage est faible, utilisez des bandes ou des vêtements réfléchissants pour bénéficier d'une visibilité optimale.
5. Si vous devez traverser la route, attendez d'avoir établi un contact visuel avec les automobilistes avant de vous engager pour vous assurer qu'ils vous ont bien vu. En cas de doute, laissez-les passer et n'avancez que lorsque la voie est libre.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

L. SÉCURITÉ A BORD D'UN VÉHICULE MOTORISÉ



5.1 5.2

⚠ AVERTISSEMENT

Dans la mesure du possible, l'utilisateur doit prendre place dans le siège du véhicule et utiliser la ceinture de sécurité du véhicule.

Sunrise Medical fournit un système d'ancrage et de retenue conforme à la norme WC-19, appelé option Transit. Afin de déterminer si votre fauteuil possède l'option Transit, recherchez les quatre points d'arrimage. Deux points à l'avant (A) et deux points à l'arrière (B). Ces points sont accompagnés d'autocollants apposés sur ou à proximité des points d'arrimage.

Si votre fauteuil roulant est équipé de l'option Transit, reportez-vous au supplément livré avec votre fauteuil qui aborde plus en détail la procédure d'ancrage, pour obtenir des informations et instructions complémentaires. Si vous n'êtes pas en possession de ce supplément, vous pouvez vous procurer un exemplaire auprès de votre détaillant Sunrise Medical agréé ou appeler Sunrise Medical au 1-800-333-4000.

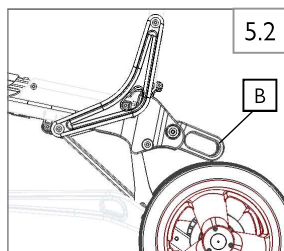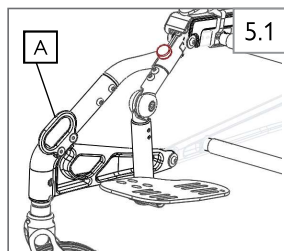

Repérez ce symbole sur votre fauteuil. Il indique les points d'arrimage de votre fauteuil conformément à la norme ANSI/RESNA (1998) V.1 - Section 19 et/ou ANSI/RESNA (2012) V.4 WC-19. Pour plus d'informations sur le transport de la fauteuil, reportez-vous au supplément livré avec votre fauteuil qui aborde plus en détail la procédure d'ancrage de la poussette.

⚠ AVERTISSEMENT

Si votre fauteuil **N'est PAS** équipé de l'option Transit :

1. NE laissez JAMAIS quiconque s'asseoir dans le fauteuil pendant le transport à bord d'un véhicule.
 - a. Installez TOUJOURS l'utilisateur du fauteuil dans un siège prévu à cet effet pendant le transport.
 - b. Attachez TOUJOURS l'utilisateur avec les ceintures de sécurité appropriées ou avec tout autre système de retenue adéquat.
2. En cas d'accident ou d'arrêt soudain, l'utilisateur pourrait être éjecté du fauteuil. Les ceintures de fauteuils roulants n'ont pas été conçues pour amortir les chocs violents et l'utilisateur pourrait être blessé par la ceinture ou la sangle.
3. Ne JAMAIS placer le fauteuil sur le siège avant d'un véhicule. Il pourrait basculer et gêner le conducteur.
4. TOUJOURS attacher le fauteuil de sorte qu'il ne puisse pas rouler ou bouger.
5. N'utilisez JAMAIS un fauteuil qui se trouvait à bord d'un véhicule motorisé impliqué dans un accident. Un arrêt brutal et/ou une collision peut endommager votre fauteuil roulant sur le plan structurel. Il peut y avoir un changement structurel du fauteuil et/ou des composants endommagés ou cassés. Inspectez le fauteuil afin de détecter tout signe d'endommagement, comme les fissures, les bosselures, toute déformation du métal, de la tôle froissée ou tout endommagement du support d'assise. Si le fauteuil a été impliqué dans un accident, ne le réutilisez pas et contactez votre détaillant agréé Sunrise Medical pour le faire inspecter. Suite à un accident ou à une collision, déterminez avec votre détaillant si le dispositif est en état de fonctionnement. En cas de doute quant à la gravité des dégâts et à l'état du fauteuil roulant, Sunrise Medical recommande de le remplacer.

REMARQUE — Tout fauteuil ayant fait l'objet d'une collision voit sa garantie annulée.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

M. BESOIN D'AIDE ?**⚠ AVERTISSEMENT**

Pour l'utilisateur : Veillez à ce que toutes les personnes qui vous assistent lors de vos déplacements aient pris connaissance des consignes et avertissements et les respectent.

Pour les accompagnateurs :

1. Demandez au professionnel de santé qui suit l'utilisateur du fauteuil, de vous apprendre les méthodes sûres et appropriées à vos capacités et à celles de l'utilisateur.
2. Indiquez toujours à l'utilisateur ce que vous avez l'intention de faire et expliquez ce que vous attendez de lui. Ceci le mettra en confiance et réduira les risques d'accident.
3. Le fauteuil doit impérativement être équipé de poignées. Elles vous permettent de contrôler fermement l'arrière du fauteuil pour éviter qu'il ne bascule. Vérifiez que les poignées ne tournent pas dans le vide et ne glissent pas.
4. Pour éviter de vous faire mal au dos, adoptez une bonne position et les gestes adéquats. Lorsque vous soulevez, soutenez ou inclinez l'utilisateur du fauteuil, pliez légèrement les genoux et maintenez votre dos aussi droit que possible.
5. Rappelez à l'utilisateur qu'il doit se pencher vers l'arrière lorsque vous inclinez le fauteuil vers l'arrière.
6. Lorsque vous descendez un trottoir ou une simple marche, descendez le fauteuil lentement et avec souplesse. Ne le laissez pas retomber brutalement au sol. Ceci pourrait l'abîmer ou blesser l'utilisateur.
7. Lorsque le fauteuil est laissé sans supervision, ne serait-ce que pendant un court instant, pensez TOUJOURS à serrer le frein d'immobilisation pour verrouiller les roues arrière. Ceci réduira tout risque de basculement ou de perte de contrôle du fauteuil.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander de l'aide pour éviter tout risque de chute, de basculement ou de perte de contrôle de votre fauteuil susceptible d'entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

N. DANGER D'ÉTOUFFEMENT**⚠ AVERTISSEMENT**

REMARQUE - Le fauteuil se compose d'un grand nombre de petites pièces que les jeunes enfants pourraient mettre à la bouche et qui représentent un risque d'étouffement. Lorsque vous démontez des pièces du fauteuil, veillez à les placer hors de portée des enfants. Si un enfant venait à ingérer une pièce, demandez de l'aide immédiatement.

O. PINCEMENT DES DOIGTS**⚠ AVERTISSEMENT**

REMARQUE - Le fauteuil se compose d'un grand nombre de pièces et d'organes mobiles dans lesquels vous pouvez vous pincer/coincer les doigts. Soyez vigilant lorsque vous procédez à des réglages de la poussette, lorsque vous pliez et dépliez la poussette, lorsque vous vous déplacez avec le fauteuil ou lors de toute manipulation pour laquelle vous pourriez vous pincer les doigts.

6.0 AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ : CHUTES ET BASCULEMENTS

A. POINT D'ÉQUILIBRE

AVERTISSEMENT

Les équipements de mobilité sont fabriqués pour garantir stabilité et performance. Le point de chute de la poussette vers l'avant, l'arrière ou latéralement dépend de son centre de gravité et de sa stabilité. Les éléments suivants ont également un impact sur le centre de gravité de la poussette :

1. La hauteur du siège et son inclinaison.
2. L'angle d'inclinaison du dossier.
3. Le changement de position, de posture ou de répartition du poids de l'occupant.
4. Le déplacement sur une rampe d'accès ou une pente.
5. L'utilisation d'un sac à dos ou autre et le cumul de poids.
6. La présence d'un appareil respiratoire, de batteries, d'une bouteille d'oxygène et de toute autre option, ainsi que leur poids cumulé.

Pour garantir un centre de gravité optimal et un bon équilibre :

1. N'hésitez pas à demander à votre détaillant Sunrise Medical agréé et/ou au professionnel de santé qui vous suit de vous aider à régler correctement votre équipement de mobilité.
2. Contactez votre détaillant Sunrise Medical agréé ou le professionnel de santé qui vous suit AVANT de procéder à un quelconque réglage ou à la moindre modification du votre équipement. Peut-être serez-vous amené à procéder à d'autres modifications pour corriger le centre de gravité.
3. N'accrochez jamais des objets pesant plus de 5 lbs (2,3 kg) à la poignée de la poussette ou au dossier.

Le non-respect de ces avertissements présente un risque élevé de bascule ou de perte de contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

B. S'HABILLER OU CHANGER DE VÊTEMENTS

AVERTISSEMENT

Habiller l'enfant ou changer ses vêtements à bord du fauteuil risque de modifier la répartition du poids.

Pour réduire le risque de chute ou de basculement :

1. Faites tourner les roues avant de sorte qu'elles soient situées le plus en avant possible. Cela permet de stabiliser le fauteuil.
2. Placez le fauteuil roulant contre un mur ou bloquez les deux roues arrière.

Le non-respect de ces avertissements présente un risque élevé de bascule ou de perte de contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

C. OBSTACLES

AVERTISSEMENT

Le franchissement de trottoirs ou d'obstacles peut faire basculer le fauteuil et entraîner de graves blessures. Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à franchir en toute sécurité un trottoir ou un obstacle, DEMANDEZ TOUJOURS DE L'AIDE. Soyez conscient de vos capacités et de vos limites personnelles. Approfondissez votre maîtrise du fauteuil uniquement en présence d'une tierce personne.

Pour éviter les dangers lors du franchissement d'obstacles :

1. Soyez alerte au moindre signe de danger – regardez loin devant vous lorsque vous vous déplacez en fauteuil.
2. Chez vous et sur votre lieu de travail, assurez-vous que les sols et les surfaces sont bien de niveau et ne présentent aucun obstacle.
3. Enlevez ou couvrez les bandes de seuil entre les pièces.
4. Installez une rampe d'accès aux portes d'entrée. Vérifiez qu'il n'y a aucun dénivelé au bas de la rampe d'accès.
5. Pour rectifier votre point d'équilibre :
 - a. Penchez le haut de votre corps légèrement vers l'AVANT au moment de FRANCHIR un obstacle.
 - b. Penchez le haut de votre corps en ARRIÈRE lorsque vous DESCENDEZ un obstacle ou passez d'un niveau élevé à un niveau inférieur.
6. Ne franchissez pas un obstacle sans assistance.
7. Ne prenez jamais appui sur quoi que ce soit (meuble ou embrasure de porte) pour vous propulser ou prendre de l'élan.

Le non-respect de ces avertissements présente un risque élevé d'endommagement, de bascule ou de perte de contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

D. DÉCOLLAGE DES ROUES AVANT

AVERTISSEMENT

Il peut arriver que les roues avant, ordinairement en contact avec le sol, décollent intentionnellement ou pas, tandis que les roues arrière restent au sol. Il convient de ne JAMAIS procéder au contrôle du tangage (partiel ou total) sans avoir préalablement consulté votre professionnel de santé.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

E. SE METTRE EN EXTENSION OU SE PENCHER

AVERTISSEMENT

À chaque fois que l'enfant se penche, il déplace le centre de gravité de son fauteuil. Il pourrait tomber ou faire basculer la poussette. En cas d'hésitation, l'enfant doit toujours demander de l'aide ou utiliser un système permettant d'étendre sa portée.

1. Ne laissez JAMAIS l'enfant se mettre en extension ou se pencher si cela l'oblige à déplacer la répartition de son poids ou à se lever du siège.
2. Ne laissez JAMAIS l'enfant se mettre en extension ou se pencher si cela nécessite qu'il s'avance sur son siège. Son fessier doit toujours rester en contact avec le dossier.
3. Ne laissez JAMAIS l'enfant attraper un objet avec ses deux mains. Il serait incapable de se rattraper pour éviter de tomber si le fauteuil venait à basculer.
4. Ne laissez JAMAIS l'enfant se mettre en extension ou se pencher en arrière.
5. Ne laissez pas l'enfant se mettre en extension par-dessus le dossier. Ceci pourrait endommager l'un ou les deux montants du dossier et faire basculer le fauteuil.
6. Si votre enfant tente d'attraper un objet, rapprocher le fauteuil le plus près possible de l'objet et faites tourner les roues avant jusqu'à ce qu'elles soient le plus vers l'avant possible.
7. Remarque — Pour ce faire: Pour ce faire: avancez le fauteuil au-delà de l'objet que l'enfant souhaite attraper, puis faites marche arrière.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

F. RECULER

AVERTISSEMENT

Soyez extrêmement vigilant lorsque vous reculez. Votre fauteuil est au plus stable lorsque vous avancez. Si l'une des roues arrière venait à heurter un objet, vous risqueriez de perdre le contrôle de votre fauteuil ou de basculer.

1. Reculez votre fauteuil lentement et sans mouvement brusque.
2. Faites des pauses régulières et assurez-vous que la voie est dégagée.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

G. ESCALATORS

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez JAMAIS ce fauteuil dans un escalier roulant, même si vous êtes accompagné. Vous pourriez tomber ou faire basculer le fauteuil.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

H. RAMPES D'ACCÈS,
PENTES ET INCLINAISONS

6.1 6.2 6.3 6.4

⚠ AVERTISSEMENT

Dans la mesure du possible, évitez d'emprunter des pentes, des rampes d'accès et des dévers. Ce qui aurait pour effet de modifier le centre de gravité du fauteuil. Votre fauteuil est moins stable et plus difficile à manœuvrer lorsqu'il est incliné.

1. **N'utilisez PAS** votre fauteuil sur une pente inclinée à plus de 6 %. Une pente à 6 % signifie un mètre de dénivellation tous les dix mètres.
2. **Avancez TOUJOURS** le plus droit possible, aussi bien en montant qu'en descendant. Ne « tournez pas les coins » sur une pente ou sur une rampe d'accès.
3. **NE** tournez PAS et ne changez pas de direction lorsque vous êtes sur une pente.
4. Si vous devez emprunter une rampe d'accès, placez-vous toujours au CENTRE de la rampe. La rampe doit être suffisamment large pour ne pas risquer d'en tomber.
5. **NE** vous arrêtez JAMAIS en plein milieu d'une pente très inclinée. Vous pourriez perdre le contrôle de votre fauteuil.
6. **N'utilisez JAMAIS** les freins d'immobilisation pour ralentir ou stopper le fauteuil. Cela pourrait le déporter.
7. **Soyez TOUJOURS** attentif à ce qui suit :
 - a. Surfaces mouillées ou glissantes.
 - b. Changements de degré d'inclinaison d'une pente (ou d'un bourrelet, d'une bosse ou d'un creux). Vous pourriez tomber ou faire basculer votre fauteuil.
 - c. Aux dénivelés en bas des pentes ou des rampes d'accès. Un dénivelé, même s'il n'est que de 3/4 pouce (19 mm) peut bloquer une roue avant et faire basculer votre fauteuil vers l'avant.
8. Pour réduire le risque de chute ou de basculement :
 - a. Penchez toujours votre corps vers le haut de la pente. Ceci vous permettra de compenser le changement de point d'équilibre du fauteuil, provoqué par la pente ou l'inclinaison.
 - b. **Si vous doutez de vos capacités, DEMANDEZ DE L'AIDE** autour de vous.
9. Rampes d'accès chez vous et sur votre lieu de travail - Assurez-vous que les rampes d'accès chez vous et sur votre lieu de travail sont conformes aux réglementations en vigueur.
 - a. **ÉVITEZ LES DÉNIVELÉS** : Pensez à rajouter une section au bas d'une rampe pour adoucir la transition.
 - b. **Restez TOUJOURS** au centre de la rampe d'accès et contrôlez votre vitesse.


Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques de chute, de basculement ou de perte de contrôle de votre fauteuil susceptible d'entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

Pour les accompagnateurs :

Pour aider un utilisateur à monter et descendre une rampe, suivez les étapes suivantes :

1. Restez derrière le fauteuil.
2. Saisissez fermement les poignées.
3. Lors de la montée ou la descente d'une rampe, le fauteuil doit impérativement être orienté face à la route.


Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

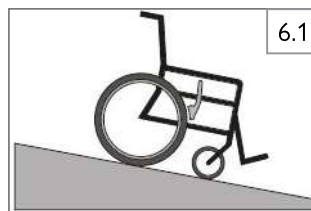

6.1

SI vous devez descendre une pente :


- a. La pente doit être inférieure à 6°
- b. **DÉPLACEZ-VOUS LENTEMENT** Contrôlez votre vitesse
- c. **Déplacez-vous TOUJOURS** en ligne droite
- d. **Ne changez JAMAIS** de direction
- e. **Penchez-vous TOUJOURS** en arrière

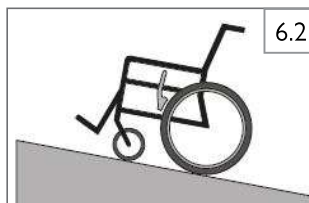

6.2

SI vous devez monter une côte :


- a. La côte doit être inférieure à 6°
- b. **Déplacez-vous TOUJOURS** en ligne droite
- c. **NE VOUS ARRÊTEZ PAS**
- d. **Ne changez JAMAIS** de direction
- e. **Penchez-vous TOUJOURS** en avant

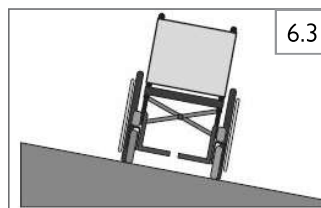

6.3

SI vous devez traverser une pente en dévers :

- a. Le dévers doit être inférieur à 6° pour éviter tout risque de basculement du fauteuil.
- b. **NE VOUS ARRÊTEZ PAS**
- c. **Ne changez JAMAIS** de direction

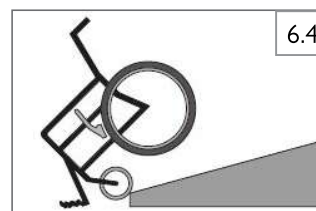

6.4

SI vous devez emprunter une rampe d'accès :

- a. **Déplacez-vous lentement**
- b. **Soyez attentif aux éventuels dénivelés**
- c. **Montez ou descendez TOUJOURS** une pente en ligne droite
- d. **Restez au centre de la rampe.**

I. TRANSFERT 6,5 6.6

AVERTISSEMENT

Il est dangereux de monter et de descendre du fauteuil lorsque vous êtes seul. Cela nécessite un bon équilibre et de l'agilité. Sachez qu'à chaque fois que vous montez ou descendez de votre fauteuil, il y a toujours un bref instant où celui-ci ne se trouve pas sous vous.

Pour éviter de tomber :

1. Travaillez avec le professionnel de santé qui vous suit pour apprendre des méthodes de transfert sûres.
 - a. Apprenez à bien positionner votre corps et à bien vous tenir lorsque vous montez ou descendez du fauteuil.
 - b. Faites-vous aider jusqu'à ce que vous sachiez monter et descendre seul de votre fauteuil en toute sécurité.
2. Avant de monter ou de descendre du fauteuil, pensez à bloquer les roues arrière.
3. Sachez que malgré cela, votre fauteuil peut glisser et/ou basculer. Les freins de stationnement des roues arrière empêchent le fauteuil de se déplacer durant un transfert.
4. Placez le fauteuil aussi proche que possible du siège sur lequel vous désirez vous asseoir. Si possible, utilisez une planche de transfert.
5. Faites tourner les roues avant de sorte qu'elles soient situées le plus en avant possible.
6. Si vous le pouvez, enlevez les repose-pieds ou rabattez-les.
 - a. Faites attention de ne pas vous prendre les pieds dans l'espace situé entre les repose-pieds.
 - b. Évitez de prendre appui sur les repose-pieds. Cela pourrait faire basculer le fauteuil.
7. Pensez à enlever ou à écarter les accoudoirs pour qu'ils ne vous gênent pas.
8. Veillez à vous placer le plus au fond possible du siège. Cela réduira le risque de voir le fauteuil basculer ou glisser.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques de chute, de basculement ou de perte de contrôle de votre fauteuil susceptible d'entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.


Position de transfert optimale



6,5

Avant de monter ou descendre du fauteuil :

1. Relevez ou enlevez les accoudoirs.
2. Rabattez ou enlevez les repose-pieds.
3. Vérifiez d'avoir serré les freins d'immobilisation.

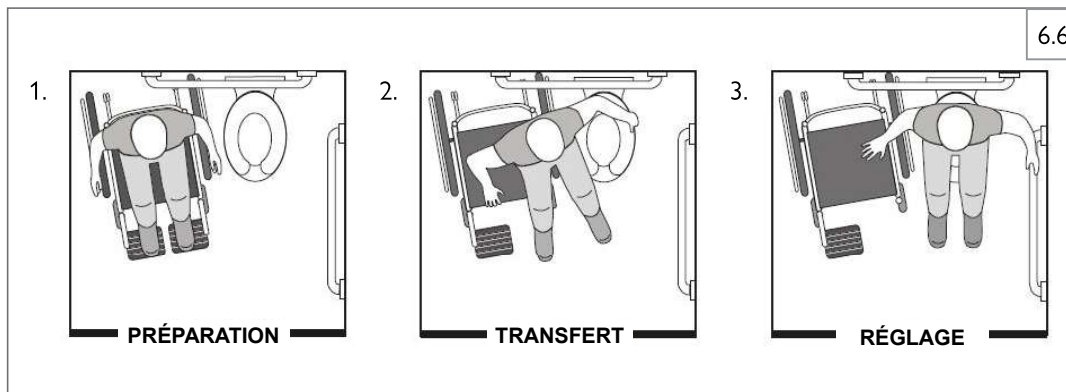

6.6

J. TROTTOIRS ET MARCHES 6,7


AVERTISSEMENT

Avant de franchir un trottoir et de négocier la moindre marche, demandez TOUJOURS à vous faire assister. Le franchissement de trottoirs et de marches peut faire basculer le fauteuil et entraîner de graves blessures. En cas de doute quant à votre capacité à éviter ou à surmonter un obstacle, demandez toujours de l'aide. Soyez conscient de vos capacités et de vos limites personnelles. Approfondissez votre maîtrise du fauteuil uniquement en présence d'une tierce personne.

Accompagnateur : Les personnes susceptibles d'aider l'utilisateur à franchir des trottoirs et des marches doivent lire et respecter toutes les instructions et les avertissements adressés aux accompagnateurs et professionnels de santé.

1. N'essayez pas de monter un trottoir ou une marche de plus de 4 pouces [101mm] de haut À MOINS d'être accompagné. Votre fauteuil pourrait aller outre son point d'équilibre et basculer.
2. Avec l'aide de votre accompagnateur, montez et descendez le trottoir ou la marche en avançant droit. Si vous êtes de biais, vous risquez de tomber ou de faire basculer le fauteuil.
3. N'oubliez pas que l'impact subi par votre fauteuil lorsque vous descendez un trottoir ou une marche, peut endommager votre fauteuil ou desserrer les fixations.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques de chute, de basculement ou de perte de contrôle de votre fauteuil susceptible d'entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

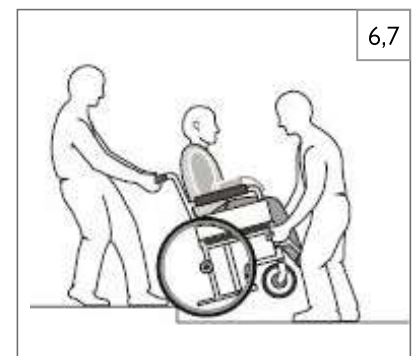

6,7

K. MONTER UN TROTTOIR OU UNE MARCHÉ SIMPLE 6,7**⚠ AVERTISSEMENT**

Pour l'accompagnateur : Suivez les étapes ci-dessous pour aider l'utilisateur à monter un trottoir ou une marche EN MARCHÉ ARRIÈRE :

1. Restez derrière le fauteuil.
2. Reculez jusqu'à ce que les roues arrière touchent le trottoir ou la marche. Tirez le dispositif vers le haut de sorte que les roues arrière viennent reposer sur le haut du trottoir ou de la marche.
3. Continuez à reculer jusqu'à ce que les roues avant aient dépassé la bordure du trottoir, et abaissez le dispositif pour le ramener à sa position de déplacement normale.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

L. DESCENDRE UN TROTTOIR OU UNE MARCHÉ SIMPLE 6,7**⚠ AVERTISSEMENT**

Accompagnateur : Suivez les étapes ci-dessous pour aider l'utilisateur à descendre un trottoir ou une marche EN MARCHÉ AVANT :

1. Restez derrière le fauteuil.
2. Avant d'atteindre le bord du trottoir ou de la marche, faites légèrement basculer le fauteuil et tirez-le en arrière.
3. Lorsque le fauteuil est à son point d'équilibre, avancez lentement jusqu'à ce que les roues arrière atteignent le bord du trottoir ou de la marche. Laissez ensuite les roues arrière descendre lentement le long du trottoir ou de la marche.
4. Poussez le fauteuil jusqu'à ce que vous ayez vous-même descendu le trottoir ou la marche.
5. Une fois les roues arrière positionnées sécuritairement en bas du trottoir ou de la marche, inclinez le fauteuil vers l'arrière jusqu'à son point d'équilibre.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

M. ESCALIERS 6.8**⚠ AVERTISSEMENT**

1. N'utilisez JAMAIS votre fauteuil dans les escaliers, À MOINS d'être accompagné. Vous pourriez tomber ou faire basculer votre fauteuil.
2. Pour des raisons de sécurité, le franchissement d'un escalier exige la présence d'au moins 2 accompagnateurs.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

N. MONTER DES ESCALIERS 6.8**⚠ AVERTISSEMENT**

1. Deux personnes au moins doivent être présentes pour monter un fauteuil et son occupant en haut d'un escalier.
2. Le fauteuil et son occupant doivent faire DOS à l'escalier.
3. La personne située à l'arrière du fauteuil dirige la manœuvre. C'est elle qui incline le fauteuil en son point d'équilibre.
4. Une deuxième personne placée à l'avant tient le fauteuil par une partie non amovible du châssis avant et soulève le fauteuil, en montant une marche à la fois.
5. Les deux personnes montent une marche à la fois, jusqu'en bas de l'escalier.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

O. DESCENDRE DES ESCALIERS 6.8**⚠ AVERTISSEMENT**

1. Deux personnes au moins doivent être présentes pour descendre un fauteuil et son occupant en bas d'un escalier.
2. Le fauteuil et son occupant doivent descendre en faisant FACE à l'escalier.
3. La personne située à l'arrière du fauteuil dirige la manœuvre. Elle incline le fauteuil en son point d'équilibre et le fait avancer jusqu'au bord de la marche du haut.
4. La seconde personne se tient sur la troisième marche en partant du haut et attrape le châssis du fauteuil. Elle descend le fauteuil une marche à la fois en laissant à chaque fois les roues arrière reposer sur le rebord de la marche.
5. Les deux personnes descendent une marche à la fois, jusqu'en bas de l'escalier.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.



6.8

7.0 AVERTISSEMENTS : COMPOSANTS ET OPTIONS

A. ACCOUDOIRS

⚠ AVERTISSEMENT

Les accoudoirs sont rabattables et ne sont pas prévus pour supporter le poids du fauteuil.

1. NE SOULEVEZ JAMAIS le fauteuil par les accoudoirs. Ceux-ci pourraient se détacher ou casser.
2. Soulevez toujours le fauteuil en saisissant des parties fixes, non amovibles du châssis.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

B. COUSSIN ET SIÈGE EN TOILE

⚠ AVERTISSEMENT

1. Le siège en toile et le coussin en mousse standard du Zippie ne sont pas prévus pour soulager la pression.
2. Si vous souffrez d'escarres ou êtes un sujet à risque, peut-être aurez-vous besoin d'un système d'assise spécial ou d'un dispositif pour le contrôle de votre posture. Consultez le professionnel de santé qui vous suit pour savoir si un tel dispositif est nécessaire à votre bien-être.
3. L'utilisateur ne doit pas s'asseoir directement sur la toile du siège. Il convient de placer un coussin ou un autre type d'assise sur la toile de siège avant d'y prendre place.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

C. FIXATIONS

⚠ AVERTISSEMENT

La plupart des vis, boulons et écrous de ce fauteuil sont des fixations ultra résistantes. L'utilisation de fixations inadéquates pourra nuire au bon fonctionnement de votre fauteuil.

1. N'utilisez QUE des fixations fournies par un détaillant Sunrise Medical agréé (ou de type et de résistance similaire, tels qu'indiqués sur les têtes).
2. Des fixations trop ou pas assez serrées peuvent entraîner une défaillance ou endommager certains composants de votre fauteuil.
3. Si les boulons ou les vis sont desserrés, resserrez-les tout de suite.

REMARQUE - Pour des raisons de sécurité et de performance, il est recommandé de ne pas réutiliser les fixations.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

D. REPOSE-PIEDS

⚠ AVERTISSEMENT

1. En leur point le plus bas, les repose-pieds doivent être AU MOINS à 51 mm (2 pouces) du sol. S'ils sont trop BAS, ils heurteront les obstacles que vous pourrez rencontrer en condition normale aux cours de vos déplacements. Votre fauteuil risquerait de s'arrêter brusquement et de basculer vers l'avant.
2. Pour éviter de trébucher ou de tomber lorsque vous montez ou descendez de votre fauteuil :
 - a. Veillez à pas ne pas vous coincer les pieds dans l'espace situé entre les repose-pieds.
 - b. Évitez de prendre appui sur les repose-pieds, car le fauteuil pourrait basculer en avant.
 - c. Pensez à rabattre ou à enlever les repose-pieds avant de monter ou de descendre du fauteuil.
3. NE soulevez jamais le fauteuil par les repose-pieds. Ils sont amovibles et ne sont pas prévus pour supporter le poids du fauteuil. Soulevez toujours le fauteuil en saisissant des parties fixes, non amovibles du châssis.
4. N'ouvrez pas les portes en poussant avec les repose-pieds de votre fauteuil. Outre les risques que cela représente, vous occasionneriez leur usure prématurée.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

E. SANGLE DE MAINTIEN (en option)

⚠ AVERTISSEMENT

Les ceintures pelviennes de sécurité NE SERVENT QU'À maintenir la posture de l'utilisateur en place. Elles peuvent aussi empêcher le glissement de l'utilisateur pendant l'utilisation du fauteuil. La ceinture de positionnement n'est pas une ceinture de sécurité homologuée et ne doit pas remplacer la ceinture de sécurité pendant le transport à bord des véhicules automobiles. Une mauvaise utilisation de la ceinture de positionnement peut entraîner de graves blessures, voire le décès de l'utilisateur. Si vous utilisez une ceinture de positionnement, respectez les recommandations suivantes :

1. S'assurer que l'occupant ne glisse pas du siège du fauteuil roulant. Cela pourrait comprimer sa cage thoracique ou entraîner une suffocation sous la pression de la ceinture.
2. Les ceintures doivent être bien ajustées sans être trop serrées, pour ne pas gêner la respiration. Vous devez être capable de glisser votre main ouverte, à plat, entre la ceinture et l'occupant du fauteuil.
3. Une cale pelvienne ou un dispositif similaire peut aider à maintenir l'utilisateur en place dans le siège. Communiquez avec le professionnel de la santé qui suit l'utilisateur pour savoir si un tel dispositif est nécessaire.
4. N'utilisez les ceintures qu'avec un utilisateur capable de réagir en cas de besoin. L'utilisateur doit être capable de détacher facilement la ceinture en cas d'urgence.
5. N'utilisez JAMAIS les ceintures de positionnement
 - a. Comme système de retenue de l'occupant du fauteuil. Cela nécessite une prescription médicale.
 - b. Si l'utilisateur est comateux ou agité.
 - c. Comme système de retenue dans un véhicule automobile. En cas d'accident ou d'arrêt soudain, l'utilisateur pourrait être éjecté du fauteuil. Les ceintures de positionnement de fauteuils roulants ne sont pas prévues à cet effet et pourraient être source de blessures supplémentaires.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.


F. POIGNEES DE POUSSÉE 7.1

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que le fauteuil est équipé de poignées.

1. Elles permettent à l'accompagnateur de tenir fermement l'arrière du fauteuil pour éviter qu'il ne bascule.
2. Vérifiez que les poignées (A) ne tournent pas dans le vide et ne glissent pas.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

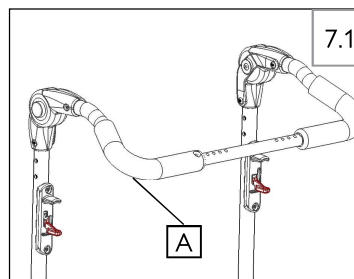

G. ESSIEUX À LIBÉRATION RAPIDE

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'utilisez pas le fauteuil avant d'avoir vérifié que les deux essieux à déclenchement rapide sont enclenchés.
2. L'essieu n'est verrouillé qu'une fois que le bouton à déclenchement rapide sort complètement. Si l'essieu n'est pas entièrement enfoncé, la roue pourrait se détacher lorsque le fauteuil roulant est mobile, mettant ainsi son occupant en danger.
3. Il convient de régulièrement nettoyer et inspecter les essieux à déclenchement rapide afin de vérifier leur bon fonctionnement et de déceler tout éventuel signe d'usure ou de torsion. Changez-les si nécessaire.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

H. BLOQUE-MOYEU DES ROUES ARRIÈRE**⚠ AVERTISSEMENT**

Les freins de stationnement arrière n'ont pas été conçus pour ralentir ou arrêter un fauteuil en déplacement. Ils servent à maintenir votre fauteuil immobilisé une fois que vous êtes à l'arrêt complet.

1. N'utilisez jamais les freins de stationnement arrière pour ralentir ou arrêter le fauteuil en déplacement. Vous pourriez tomber ou faire basculer votre fauteuil.
2. Pour empêcher les roues arrière de tourner, verrouillez toujours le bloque-moyeu lorsque vous montez ou descendez de votre fauteuil.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

I. SYSTÈMES D'ASSISE MODIFIÉS**⚠ AVERTISSEMENT**

L'utilisation d'un système d'assise non approuvé par Sunrise Medical pourrait avoir une incidence sur le point d'équilibre de votre fauteuil. Et pourrait le faire basculer.

1. Ne modifiez pas le système d'assise de votre fauteuil sans avoir PRÉALABLEMENT consulté votre détaillant Sunrise Medical agréé.
2. L'utilisation d'un système d'assise non approuvé par Sunrise Medical pourrait avoir une incidence sur le mécanisme de pliage de votre fauteuil.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

J. GARNITURE DU SIÈGE ET DU DOSSIER**⚠ AVERTISSEMENT**

1. Si la toile du siège ou du dossier présente des signes d'usures, remplacez-la dès que possible. Le non-respect de cette consigne pourrait, à terme, entraîner la déchirure de la toile du siège ou du dossier.
2. Le tissu de la sangle finira par s'user avec le temps. Vérifiez que le tissu n'est pas effiloché, usé ou détendu, en particulier au niveau des bordures et des coutures.
3. Évitez de vous laisser tomber dans le siège. Cela détendra la toile et vous obligera à l'inspecter et à la changer plus souvent.
4. Un lavage excessif ou une trop grande humidité aura pour effet de réduire les propriétés ignifugeantes de la toile.
5. En présence d'une garniture à tension réglable, desserrez les sangles ou déposez la garniture avant de plier ou de déplier le fauteuil.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

K. POIGNÉE**⚠ AVERTISSEMENT**

1. Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans le mécanisme de verrouillage situé au bas des cannes de dos lorsque vous pliez ou dépliez ce dernier.
2. Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans la charnière lorsque vous ajustez la poignée de poussée réglable.

L. TABLETTE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE ET BATTERIE**⚠ AVERTISSEMENT**

Ne prenez jamais place dans le fauteuil à bord d'un véhicule motorisé avant d'avoir enlevé tous les composants de la tablette pour batterie et de les avoir rangés séparément dans le véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou de retirer les composants de la tablette pour batterie, contactez toujours le service technique afin de connaître l'emplacement exact des tubes cylindriques.

⚠ AVERTISSEMENT

Le poids combiné de l'utilisateur, de l'appareil respiratoire, de la batterie et de la tablette ne doit pas dépasser 250 lbs (114 kg).

M. CROCHET POUR ACCESSOIRES**⚠ AVERTISSEMENT**

La limite de poids que peut supporter le crochet est de 10 lbs (4,5 kg) au total.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de tomber, de basculer ou de perdre le contrôle de votre fauteuil, ce qui pourrait entraîner de graves blessures, pour vous ou toute autre personne.

8.0 UTILISATION ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

Il incombe au propriétaire du fauteuil et/ou à l'aidant de confier les réglages et la configuration à un technicien qualifié exécutant les recommandations émises par un professionnel de santé. Le fauteuil peut nécessiter des inspections régulières pour en vérifier la sécurité et le bon fonctionnement, ainsi que des réglages sans outils réalisés par le propriétaire, l'accompagnateur ou le détaillant Sunrise Medical, le cas échéant. Utilisez toujours pour ce fauteuil des pièces et/ou accessoires recommandés par Sunrise Medical.

A. INTRODUCTION

- Un bon entretien améliorera la performance et prolongera la durée de vie de votre fauteuil.
- Nettoyez votre fauteuil régulièrement et profitez-en pour vérifier que les pièces ne sont pas desserrées ni usées. Ceci facilitera la manipulation de votre fauteuil. Pour le nettoyage, utilisez un détergent doux et des chiffons.
- Le cas échéant, faites réparer ou remplacer toute pièce desserrée, usée, tordue ou endommagée **avant d'utiliser votre fauteuil**. Utilisez TOUJOURS des pièces et/ou accessoires recommandés et approuvés par Sunrise Medical.
- Pour protéger votre investissement, confiez toujours l'entretien majeur et les réparations à votre détaillant agréé de Sunrise Medical.
- Inspectez et entretenez votre fauteuil conformément à la charte d'entretien fournie.**
- En cas de problème, commandez les pièces auprès de votre détaillant agréé Sunrise Medical et confiez à ce dernier les inspections et les réparations avant de réutiliser votre fauteuil.**
- À chaque année, procéder à une inspection complète et à un contrôle de sécurité de votre fauteuil par un détaillant agréé de Sunrise Medical.**

B. CONSEILS D'ENTRETIEN

- Essieux et manchons d'essieu :**
Lorsque vous vérifiez les essieux et gaines d'essieux tous les six mois, profitez-en pour vérifier qu'ils sont propres et bien serrés. Des canons d'essieu desserrés sont susceptibles d'endommager la plaque d'essieu et de compromettre la bonne performance de votre fauteuil.

C. CONSEILS DE NETTOYAGE

- Peinture**
 - Nettoyez les surfaces peintes avec de l'eau savonneuse ou un détergent doux au moins une fois par mois.
 - Protégez la peinture en appliquant une couche de cire non abrasive tous les trois mois.
- Essieux et pièces mobiles**
 - À CHAQUE SEMAINE, nettoyez autour des essieux et des pièces mobiles avec un chiffon humide (et non mouillé).
 - Éliminez les peluches, poussières ou salissures accumulées autour des essieux et des pièces mobiles.
- Toile**
 - Lavage à la main (le lavage à la machine risque d'abîmer le tissu).
 - Laissez sécher naturellement. NE PAS UTILISER la sècheuse car la chaleur détériore le tissu.
- Entretien de base - Matériel disponible dans les commerces**
 - Chiffon de nettoyage ou en coton
 - Lubrifiant à base de Téflon®
 - Détergent doux
 - Lubrifiant à vaporiser à base de silicone

REMARQUE - Il n'est pas nécessaire de graisser ou d'huiler le fauteuil.

D. TABLEAU DE MAINTENANCE

Hebdomadaire	Mensuel	3 mois	6 mois	Annuel	Sécurité et vérification du fonctionnement
<input checked="" type="checkbox"/>					Bloque-moyeu
	<input checked="" type="checkbox"/>				Inspection visuelle afin de déceler la quincaillerie desserrée ou mal fixée
			<input checked="" type="checkbox"/>		Accoudoirs
			<input checked="" type="checkbox"/>		Essieu et manchons
		<input checked="" type="checkbox"/>			Essieux à déverrouillage rapide
		<input checked="" type="checkbox"/>			Roues et pneus
		<input checked="" type="checkbox"/>			Roues avant
			<input checked="" type="checkbox"/>		Châssis, mécanisme de pliage et d'inclinaison
	<input checked="" type="checkbox"/>				Toile
				<input checked="" type="checkbox"/>	Révision réalisée par un détaillant Sunrise Medical agréé

REMARQUE – L'utilisateur (ou l'accompagnateur) doit procéder à ces vérifications sur une base hebdomadaire et mensuelle pour garantir la sécurité du dispositif. En cas de dysfonctionnement d'un élément, veuillez contacter votre détaillant agréé Sunrise Medical.

E. TABLEAU DE DÉPANNAGE

Symptômes					Solution
	Grincements et cliquetis	Pliage et dépliage difficiles	Difficulté à régler l'inclinaison	Difficulté à engager les poignées à loquet	
<input checked="" type="checkbox"/>					Veillez à ce que tous les écrous et boulons soient bien serrés.
<input checked="" type="checkbox"/>					Passez du lubrifiant Tri-Flow (à base de Téflon®) entre les organes de connexion et les différentes pièces.
		<input checked="" type="checkbox"/>			Vérifiez qu'aucun composant d'assise et de positionnement n'entrave le mécanisme de pliage OU Déposez le système d'assise avant le pliage
		<input checked="" type="checkbox"/>			Vaporisez du lubrifiant à base de silicone sous le rail du siège
			<input checked="" type="checkbox"/>		Vaporisez du lubrifiant à base de silicone sous le rail du siège ET Vérifiez que l'utilisateur ne s'appuie pas contre le dossier quand vous essayez de l'incliner
			<input checked="" type="checkbox"/>		Retirez le cache de la poignée à loquet et passez du lubrifiant Tri-Flow (à base de Téflon®) sur la paroi intérieure des montants du dossier

F. MONTAGE ET DÉMONTAGE DES ROUES ARRIÈRE 8.1**⚠ AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas le fauteuil AVANT d'avoir vérifié que les deux essieux à libération rapide sont enclenchés. Un essieu déverrouillé risquerait de se détacher pendant le maniement du fauteuil et de provoquer une chute.


1. Pour installer la roue

- Appuyez à fond sur le bouton à déclenchement rapide (A). Cela libère les roulements à billes à l'autre extrémité.
- Insérez l'essieu (B) dans le moyeu de la roue arrière.
- Enfoncez le bouton (A) tout en faisant glisser l'essieu (B) dans la gaine de l'essieu (C).
- Relâchez le bouton pour verrouiller l'essieu à l'intérieur de la gaine d'essieu. Ajustez l'essieu si celui-ci ne se verrouille pas. Voir le chapitre 9.0, Section D.
- Répétez ces étapes pour l'autre roue.

REMARQUE - L'essieu n'est verrouillé que si le bouton à libération rapide (A) sort complètement.

2. Pour retirer la roue

- Appuyez à fond sur le bouton à déclenchement rapide (A).
- Retirez la roue en faisant glisser l'essieu (B) hors du manchon (C).
- Répétez ces étapes pour l'autre roue.

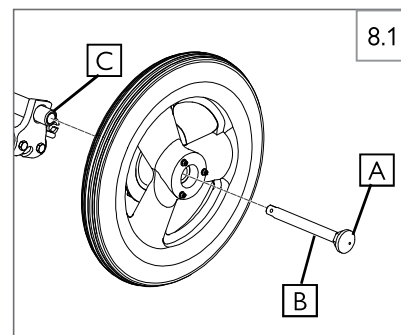
**G. BLOQUE-MOYEU** 8.2**⚠ AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas la barre ou le levier (A) du bloque-moyeu comme levier de bascule, Car cela pourrait endommager le fauteuil roulant.

Le bloque-moyeu est installé par Sunrise Medical et doit être ajusté par votre détaillant Sunrise Medical agréé.

Inspectez le bloque-moyeu une fois par semaine, conformément au planning d'entretien. Avant d'utiliser votre fauteuil roulant, assurez-vous que les deux extrémités de la barre du bloque-moyeu sont bien enclenchées dans les disques du bloque-moyeu. Vérifiez que les deux ressorts d'extension du bloque-moyeu sont bien fixés. Un bloque-moyeu mal enclenché peut entraîner le déplacement inattendu du fauteuil roulant.

- Pour enclencher le bloque-moyeu, soulevez de la pointe du pied le levier rouge (A) de la barre. Si besoin est, faites légèrement avancer ou reculer le fauteuil roulant pendant que vous relevez le levier avec votre pied pour faciliter l'enclenchement des disques.
- Pour déverrouiller le bloque-moyeu, abaissez de la pointe du pied le levier rouge (A) de la barre.

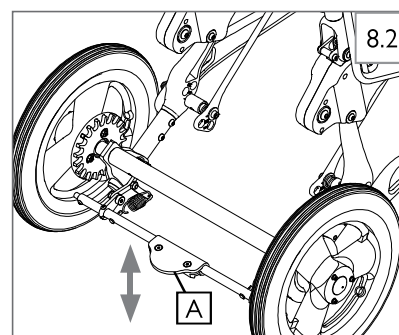**H. ACCOUDOIRS RABATTABLE AVEC VERROUILLAGE** 8.3**1. Rabattre l'accoudoir vers le haut et le bas**

- Desserrez le levier de fixation supérieur (2).
- Rabattez l'accoudoir (1). Il reste fixé au montant arrière.
- Placez l'accoudoir à la position désirée.
- Le loquet (2) s'enclenche automatiquement.


⚠ AVERTISSEMENT

Ne soulevez ou ne portez jamais un fauteuil en l'attrapant par les accoudoirs.

Vérifiez que l'accoudoir est bien enclenché.

Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous réglez la hauteur des accou-

doirs.

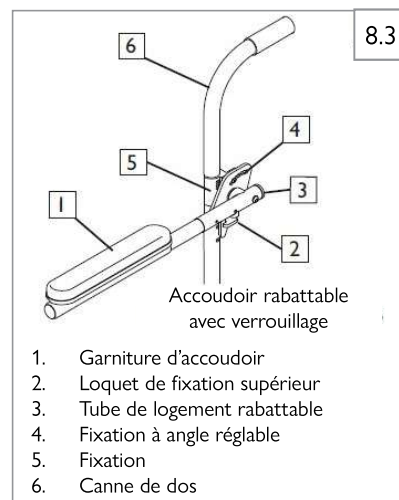

- Garniture d'accoudoir
- Loquet de fixation supérieur
- Tube de logement rabattable
- Fixation à angle réglable
- Fixation
- Canne de dos

I. REPOSE-PIEDS, REPOSE-JAMBES ET PALETTES 8.4


Votre détaillant Sunrise Medical agréé doit avoir correctement ajusté vos repose-pieds et/ou repose-jambes, conformément aux recommandations émises par le professionnel de santé qui vous suit. N'apportez aucune modification à cette configuration initiale sans l'avis préalable de ce professionnel. Le positionnement du repose-pied est un aspect essentiel qui contribue au bon alignement de votre corps et au support stable des jambes et du torse. Les repose-pieds et repose-jambes doivent être rabattus sur les côtés, voire retirés, au moment de monter ou de descendre de votre fauteuil.

Dépose de l'ensemble Repose-jambe/Palette :

- Retirez la vis de serrage (A) pour démonter l'ensemble Repose-jambe/Palette du fauteuil roulant. La vis reste attachée au fauteuil au moyen d'une lanière.
- Répétez de l'autre côté du fauteuil roulant.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les repose-pieds n'ont pas été conçus pour soulever ou porter le fauteuil avec un utilisateur assis dedans.
- Ne prenez jamais appui sur le repose-pied pour monter ou descendre du fauteuil.
- Faites attention de ne pas vous coincer les doigts lorsque vous relevez ou abaissez le repose-pieds.

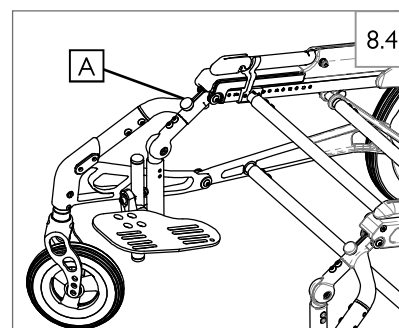

8.0 UTILISATION ET ENTRETIEN

J. GARNITURE DE DOSSIER

- Toile de dossier :
Vérifiez tous le mois que la garniture du dossier n'est pas excessivement détendue et que les éléments de fixation ne sont pas desserrés. Si vous jugez que la garniture est excessivement détendue, contactez votre détaillant agréé Sunrise Medical pour la faire remplacer.




K. GARNITURE RÉGLABLE 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12

Ajustement de la garniture à tension réglable du dossier

- Pour le réglage de la tension de la garniture du dossier, l'utilisateur ne peut pas être assis dans son fauteuil roulant.
- Retirez le rabat de protection. (Fig. 8.7)
- Les bandes doivent être réglées avec le fauteuil déplié.
- Ne tendez PAS TROP les bandes pour éviter d'appliquer inutilement une tension excessive sur les montants du fauteuil roulant.
- Réglez les bandes à la tension désirée. (Fig. 8.5)
- Si vous devez remplacer des bandes :
 - Commencez par fixer la bande du haut. Coupez à la longueur désirée.
 - Placez la partie courte (A) de la bande sur le montant du dossier. (Fig. 8.8)
 - Attachez la partie longue (B) de la bande sur le montant opposé. (Fig. 8.9)
 - Fixez l'attache crocodile (C) (Fig. 8.10). Placez l'attache au centre de la bande (D et E). Coupez ce qui dépasse, le cas échéant. (Fig. 8.11 et Fig. 8.12)
- Placez la housse du dossier et passez le rabat arrière du système d'attache à fermeture auto-agrippante par-dessus le dossier. Le logo Zippie doit être droit, au dos du dossier. (Fig. 8.7)
- Posez enfin la protection du dossier (rabat central) à plat contre les bandes réglables à fermeture auto-agrippante afin de les maintenir en place.

AVERTISSEMENT

Tout changement effectué sur les sangles aura un impact sur le centre de gravité. Il est fortement recommandé d'avoir un accompagnateur derrière le fauteuil le temps que l'utilisateur s'habitue au changement pour éviter tout risque de basculement.

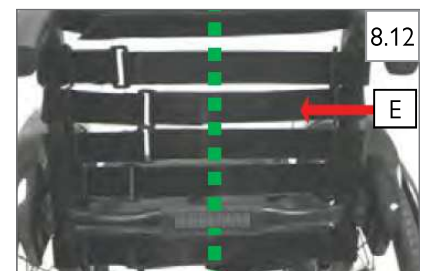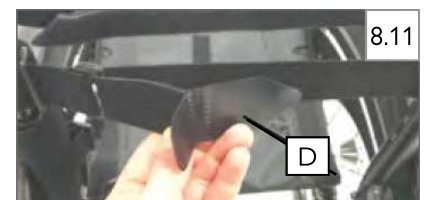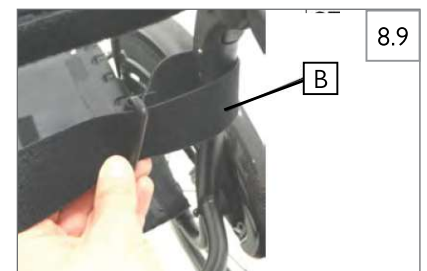

L. ASSISE ET TOILE DU SIÈGE 8.13**1. Garniture de siège**

- a. Vérifiez tous le mois que la garniture du dossier n'est pas excessivement détendue et que les éléments de fixation ne sont pas desserrés. Si vous jugez que la garniture est irrémédiablement détendue, contactez votre détaillant agréé Sunrise Medical pour la faire remplacer.

2. Installation du coussin


- a. Placez le coussin sur la toile d'assise avec la partie douce de la bande auto-agrippante vers le bas. Le bord biseauté du coussin doit être orienté vers l'avant du fauteuil. Le coussin se rabat à l'avant et sous la toile d'assise et se fixe sur les parties rêches de la bande auto-agrippante placées sous la toile. (Fig. 8.13)
- b. Appuyez fermement pour maintenir en place.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Une toile d'assise excessivement lâche ou usée risque de s'affaisser au point d'entrer en contact avec les composants du fauteuil roulant placés sur la surface d'assise. L'utilisation du fauteuil roulant dans ces conditions peut causer des blessures due à la pression contre la peau.

M. RÉGLAGE DE L'ANGLE D'INCLINAISON (dossier par rapport au siège) 8.14 8.15 8.16



1. Relevez les deux poignées à loquet à mi-hauteur jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec la butée d'inclinaison, comme illustré à la Fig. 8.14. Tout en maintenant les poignées dans cette position, relevez ou abaissez le dossier à l'angle d'inclinaison désiré.
2. Reportez-vous aux valeurs d'inclinaison inscrites sur le côté du cadre du siège pour vérifier que vous êtes à l'angle désiré. Les angles d'inclinaison possibles sont 85°, 90°, 95° et 100°. (Fig. 8.15)
3. Vérifiez d'avoir réglé l'angle à la même valeur des deux côtés du fauteuil roulant.

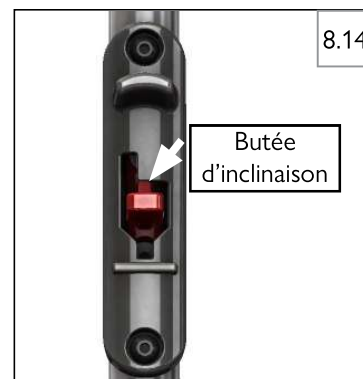**⚠ AVERTISSEMENT**

Vérifiez que les deux loquets de blocage d'inclinaison sont bien enclenchés. Si ça n'est pas le cas, bercez délicatement le dossier vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce que les loquets soient parfaitement enclenchés. (Fig. 8.16)

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas d'incliner le dossier avec la poignée à loquet en position pliée. Cela pourrait accidentellement libérer le châssis. Dans ce cas et si le châssis ne revient pas en position verrouillée, pliez et dépliez complètement le fauteuil roulant pour le ramener en position verrouillée. Avant toute utilisation, vérifiez systématiquement que le pivot avant de l'articulation est en position verrouillée, ce qui est indiqué sur le cadre du siège. (Fig. 8.15)

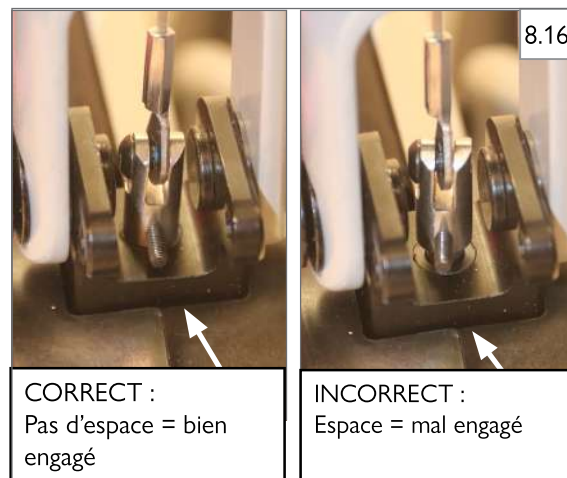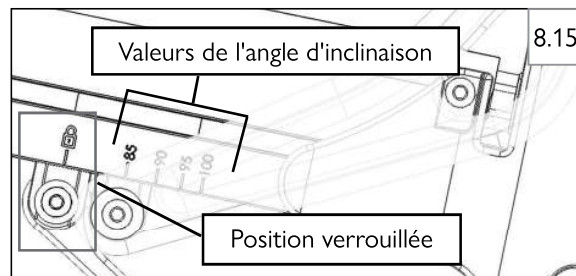

8.0 UTILISATION ET ENTRETIEN


N. PLIAGE ET DÉPLIAGE 8.17 8.18 8.19 8.20

1. Dépliage du fauteuil roulant :

- a. Avec le fauteuil posé au sol, relevez le dossier par les poignées jusqu'à ce que vous entendiez le clic audible et que le dossier s'enclenche à la première position inclinée de 85°.
- b. Vérifiez que le pivot avant de l'articulation est en position verrouillée de chaque côté du fauteuil roulant. Vérifiez que le dossier est incliné à 85°. (Fig. 8.17)

AVERTISSEMENT

Vérifiez que la glissière avant est en position verrouillée. Pour cela, assurez-vous que le repère de position verrouillée des deux côtés du cadre du siège est aligné avec le point de pivot de la glissière avant. Procédez toujours à cette vérification après avoir utilisé la poignée à loquet et avant de réutiliser le fauteuil roulant. (Fig. 8.17)

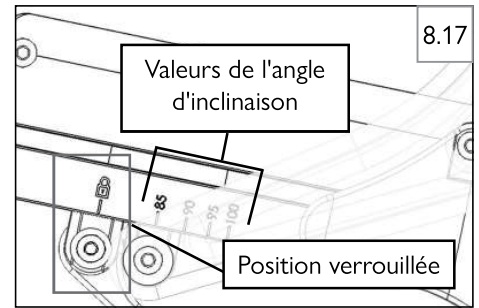

AVERTISSEMENT

Vérifiez que la goupille du dossier est bien enclenchée des deux côtés du fauteuil. (Fig. 8.20)




2. Pliage du fauteuil roulant :

- a. Relevez complètement les deux poignées à loquet au-delà de la butée d'inclinaison (Fig. 8.18). Tout en maintenant les poignées dans cette position, abaissez le dossier jusqu'à ce que le fauteuil roulant commence à se plier.
- b. **Relâchez les poignées à loquet et continuez à abaisser le dossier jusqu'à ce qu'il repose sur le siège.**
- c. Attachez la sangle pour éviter que le fauteuil ne se déplie. (Fig. 8.19)

AVERTISSEMENT

Faites attention de ne pas vous coincer les doigts dans les tubes de traverse pendant le pliage et dépliage.


Les poignées à loquet reviennent automatiquement à leur position pendant le pliage. Par conséquent, relâchez les poignées à loquet dès que le fauteuil commence à se plier. N'essayez pas de contrer le mouvement naturel des poignées à revenir en position lors du pliage du fauteuil.

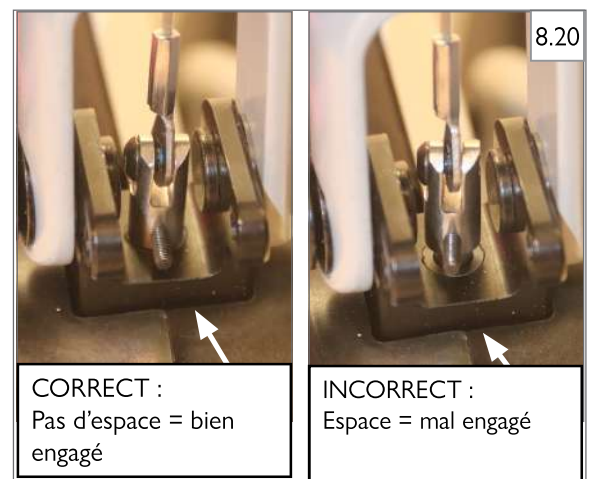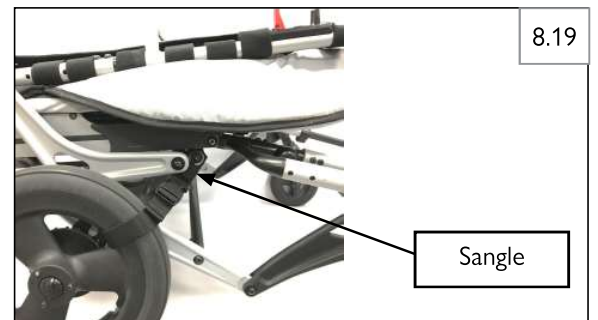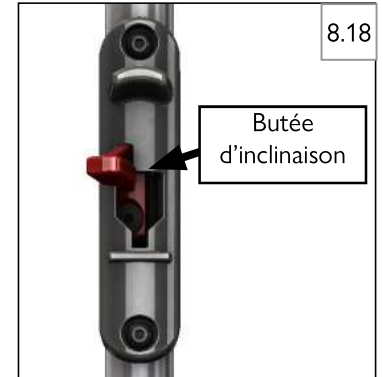

O. POIGNÉES PLIABLES ET RÉGLABLES 8.21

1. Pour libérer la poignée de poussée (A), enfoncez les deux boutons noirs (B) de part et d'autre du fauteuil. Élevez ou abaissez la poignée à la position désirée.

REMARQUE - Pour faciliter l'entreposage et la portabilité, abaissez complètement la poignée jusqu'à ce qu'elle soit à plat.

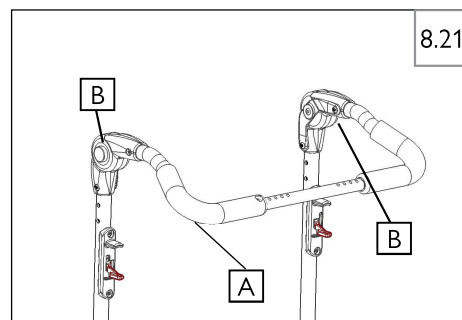**P. MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA CAPOTE** 8.22 8.23**⚠ AVERTISSEMENT**



Il est préférable que l'enfant ne soit pas assis dans son fauteuil pendant l'installation des accessoires.

1. Montage des attaches sur le châssis

- a. Clipsez chaque attache sur un montant du dossier, là où il y a de la place au-dessus de la barre arrondie. Vérifiez que les deux fixations sont solidement arrimées sur les montants.

2. Installation de la capote sur les attaches

- a. Placez-vous derrière le fauteuil et fixez la capote sur les attaches (A).
- b. Inspectez visuellement que la capote est correctement fixée et vérifiez qu'elle est fermement maintenue en place. Les loquets en plastique (B) se referment par-dessus les montants.

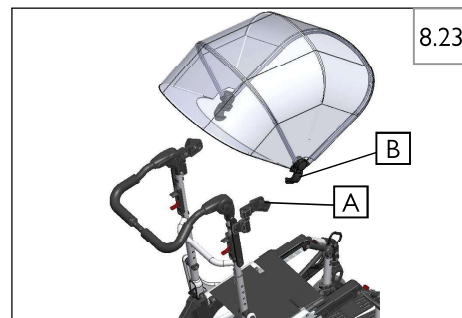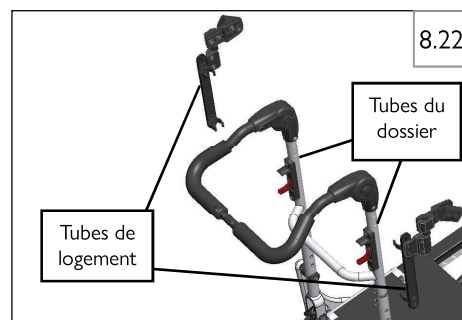**Q. CONSEILS D'ENTREPOSAGE**

1. Entrez votre fauteuil dans un endroit propre et sec. Cela évitera l'apparition de rouille et de corrosion sur votre fauteuil.
2. Avant de réutiliser votre fauteuil après une période d'entreposage, vérifiez son bon fonctionnement. Inspectez tous les éléments indiqués au « tableau de maintenance ».
3. Si vous n'avez pas utilisé votre fauteuil pendant plus de trois mois, faites-le contrôler par un détaillant Sunrise Medical agréé avant de le réutiliser.

R. INSPECTION

Une fois que le fauteuil est assemblé et réglé, il devrait avancer sans gêne. Tous les accessoires doivent également fonctionner correctement. Si vous détectez une anomalie, suivez la procédure suivante :

1. Référez-vous aux sections Configuration et Contrôle, ainsi qu'au manuel d'instructions et assurez-vous que le fauteuil a été correctement préparé.
2. Consultez le guide de dépannage.
3. Si le problème persiste, contactez votre détaillant Sunrise Medical agréé. Si, après avoir contacté votre détaillant, vous avez encore des problèmes, contactez le service client de Sunrise Medical. Pour connaître les coordonnées de votre détaillant agréé ou du service client de Sunrise Medical, reportez-vous à la page Introduction.

9.0 RÉGLAGES ET ENTRETIEN RÉALISÉS PAR LE DÉTAILLANT

AVERTISSEMENT

Il incombe au propriétaire de confier les réglages et la configuration à un technicien qualifié exécutant les recommandations émises par un professionnel de santé. La révision et/ou les réglages doivent être conformes aux recommandations émises par un professionnel de santé. Utilisez toujours pour ce fauteuil des pièces et/ou des accessoires recommandés et approuvés par Sunrise Medical. La révision et/ou les réglages nécessitant l'utilisation d'outils doivent être effectués exclusivement par un détaillant Sunrise Medical agréé appliquant les recommandations émises par un professionnel de santé.



A. RÉVISION EFFECTUÉE PAR UN DÉTAILLANT AGRÉÉ

1. Au moins une fois par an, faites faire une révision complète de votre fauteuil et un contrôle de sécurité par un détaillant agréé Sunrise Medical. La liste ci-contre énumère les outils essentiels pour un bon entretien.
2. Serrage dynamométrique - Le serrage dynamométrique correspond au serrage optimal devant être appliqué à une fixation particulière. Il est important de respecter les valeurs de couple de serrage indiquées.
3. Si vous décelez la présence d'une pièce desserrée, usée, tordue ou endommagée, réparez-la ou remplacez-la par une pièce approuvée avant de confier l'inspection de votre fauteuil à un détaillant agréé.
4. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par un détaillant Sunrise Medical agréé.

LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

1. Jeu de clés hexagonales (mesures impériales)
2. Jeu de clés hexagonales (mesures métriques)
3. Jeu de clés plates (mesures impériales)
4. Jeu de clés plates (mesures métriques)
5. Clé dynamométrique
6. Jeu de douilles hexagonales (mesures impériales)
7. Jeu de douilles hexagonales (mesures métriques)
8. Tournevis plats et cruciformes
9. Marteau en caoutchouc

B. CONSEILS D'ENTRETIEN

1. Serrage dynamométrique :

Le serrage dynamométrique correspond au serrage optimal devant être appliqué à une fixation particulière. Il est important de respecter les valeurs de couple de serrage indiquées. En l'absence d'indication spécifique, appliquez les couples de serrage suivants : Fixations M5 = 5 Nm [44 in-lbs], Fixations M6 = 7 Nm [62 in-lbs], Fixations M8 = 10 Nm [88 in-lbs]. Pour tous les autres éléments de fixation, le couple de serrage doit être de 6,8 Nm [60 in-lbs]. Tous les éléments de fixation filetés finissent par se desserrer au fil du temps et doivent être régulièrement resserrés. Ceci est particulièrement vrai pour les éléments contenant des composants élastiques.

2. Détaillant et matériel nécessaire :

Rendez-vous sur www.SunriseMedical.com pour accéder aux manuels des pièces détachées, fiches d'instructions et tutoriels qui seront très utiles pour les éventuelles réparations de votre fauteuil Zippie.

C. NETTOYAGE


1. Peinture
 - a. Nettoyez les surfaces peintes avec de l'eau savonneuse ou un détergent doux.
 - b. Protégez la peinture en appliquant une couche de cire d'auto non abrasive.
2. Essieux et pièces mobiles
 - a. Nettoyez autour des essieux et des pièces mobiles avec un chiffon humide (non mouillé).
 - b. Éliminez les peluches, poussières ou salissures accumulées autour des essieux et des pièces mobiles.
 - c. Pour la lubrification, N'UTILISEZ PAS une huile 3-en-Un ou WD-40®. Utilisez exclusivement un lubrifiant à base de Téflon® pour ce fauteuil roulant.

D. RÉGLAGE DE L'ÉCROU DE L'ESSIEU DE ROUE 9.1

1. Réglage de l'essieu de la roue arrière

Pour un bon fonctionnement du fauteuil, veillez à ce que les gaines d'essieu restent toujours bien serrées.

- a. Pour régler l'essieu (C) vous aurez besoin d'une clé 3/4" afin de tourner les écrous d'essieu extérieurs (E).
- b. Vous utiliserez également une clé de 1/2" pour maintenir le roulement à billes (D), situé en face de l'essieu, pour empêcher l'essieu de tourner.
- c. Tournez l'écrou extérieur de l'essieu (E) dans le sens horaire des aiguilles d'une montre pour le resserrer.
- d. Il ne devrait y avoir que 10 millièmes de pouce (.010 pouces) de jeu.

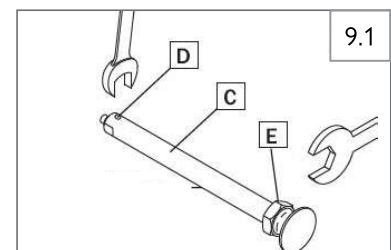

E. ACCOUDOIRS RABBATABLE AVEC VERROUILLAGE 9.2**1. Réglage de la hauteur**

- Desserrez les boulons (B) et retirez les boulons (C).
- Abaissez ou levez le collier (D) à la position désirée. Les trous pour les boulons C doivent être alignés aux trous du montant du dossier.
- Replacez les boulons (C) et resserrez les boulons (B).
- Répétez les étapes pour l'autre accoudoir.


Remarque : Le collier peut être orienté vers le haut ou le bas pour des options de réglage de la hauteur d'un demi-pouce.

2. Réglage de l'inclinaison

- Retirez la vis (E).
- Régalez l'accoudoir à l'angle désiré à l'aide des trous pré-perçés dans l'équerre d'inclinaison (A).
- Replacez la vis (E).
- Répétez les étapes pour l'autre accoudoir.

3. Réglage de la longueur (en option)

- Desserrez la vis (F) et l'écrou du tube rabattable (G).
- Placez le manchon (G) à la longueur désirée.
- Resserrez la vis (F) et l'écrou.
- Répétez les étapes pour l'autre accoudoir.

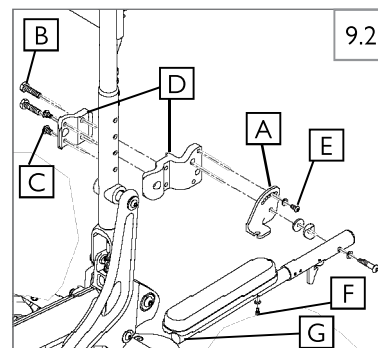
**F. POTENCES ET REPOSE-PIEDS INCLINABLES****1. Réglage de l'inclinaison de la potence** 9.3 9.4

La plage d'inclinaison recommandée de la potence est comprise entre 120° et 180°.

- Régalez l'articulation au-dessus du repose-pied (A) à l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm.
- Retirez la partie inférieure de l'articulation et remontez-la à l'angle désiré.
- Réinsérez la vis et serrez au couple de 16,3 Nm [144 in-lbs].
- Répétez de l'autre côté du fauteuil roulant.




REMARQUE : Le changement d'angle de la potence peut avoir une incidence sur la longueur du repose-pied.

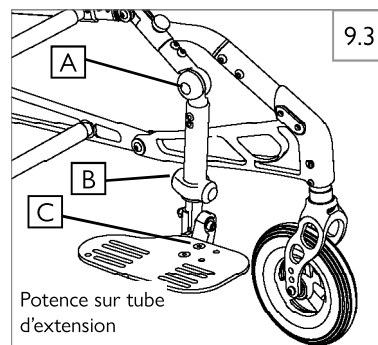

Potence sur tube d'extension

2. Réglage de la longueur de la potence sur tube d'extension 9.3


- Desserrez la vis (B) au dos de l'attache à l'aide d'une clé hexagonale de 3/16".
- Faites coulisser la potence à la longueur désirée.
- Resserrez la vis (B) au dos de l'attache à l'aide d'une clé hexagonale de 3/16".
- Serrez au couple de 16,3 Nm [144 pouce-lbs].
- Répétez de l'autre côté du fauteuil roulant.

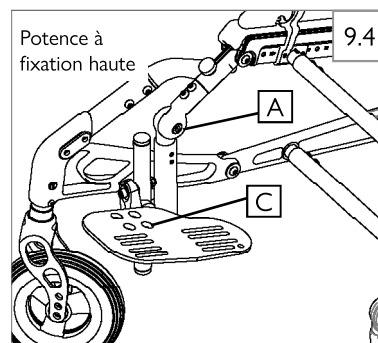

Potence à fixation haute

3. Réglage de la longueur de la potence à fixation haute 9.4 9.5 9.6

- Il est possible de modifier la hauteur des repose-pieds en réglant les attaches à fixation haute :
 - Desserrez les vis (H).
 - Régalez la position de l'attache (F) et/ou du tube (G) pour obtenir la longueur de potence désirée.
 - Resserrez les vis (H) au couple de 16,3 Nm (144 pouces/lbs).
- Pour une plus grande amplitude de réglage, retournez le tube, comme suit. (Fig. 9.6)
 - Retirez les éléments de fixation de la palette (D) et la palette (E). Retirez l'attache (F) et les vis.
 - Retournez le tube (G). Fixez l'attache (F) avec ses vis.
 - Remontez la palette (E) et ses éléments de fixation (D).

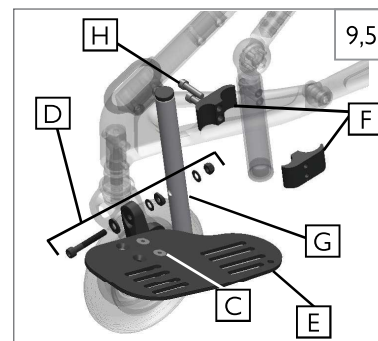

9,5


4. Repose-pieds en aluminium ajustables 9.3 9.4 9.5

- À l'aide d'une clé hexagonale de 3/16", desserrez les vis de la palette (C).
- Repositionnez la palette à l'angle d'inclinaison désiré. À l'aide d'une clé hexagonale de 3/16", resserrez les vis (C).
- Répétez de l'autre côté du fauteuil roulant.

REMARQUE - Laissez toujours un espace minimum de 2 pouces (50,8 mm) entre le point le plus bas du repose-pied et le sol.

AVERTISSEMENT

Ne prenez pas appui sur la palette pour monter ou descendre de la poussette. Le fauteuil risque de basculer vers l'avant lorsque vous vous tenez debout sur la palette. Posez vos pieds au sol lorsque vous montez ou descendez de la poussette.

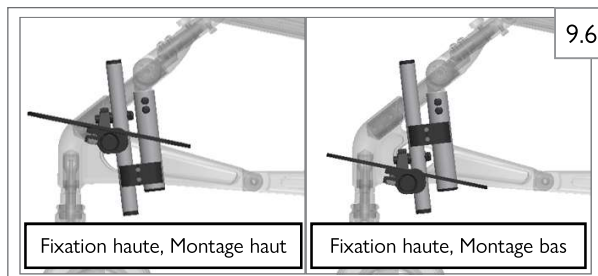

Fixation haute, Montage haut

Fixation haute, Montage bas

9.0 RÉGLAGES ET ENTRETIEN RÉALISÉS PAR LE DETAILLANT

G. DOSSIERS

9.7




9.8

9.9

Réglage du câble du dossier

S'il y a trop de jeu dans la poignée à loquet ou si le loquet de blocage d'inclinaison n'est pas complètement engagé, il convient alors d'ajuster le câble.

1. À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, retirez les deux vis (A) du cache (B). (Fig. 9.7)
2. Sur la partie haute de la bielle d'inclinaison (E), utilisez une clé hexagonale de 3 mm pour la vis C et insérez simultanément une clé hexagonale de 2 mm dans l'orifice (D) sous la bielle. (Fig. 9.8)
Remarque : il vous faudra peut-être tourner la bielle d'inclinaison (E) pour accéder à l'orifice (D).
3. Pour diminuer la tension, allongez le câble en desserrant légèrement la vis C.
4. Pour augmenter la tension, raccourcissez le câble en resserrant légèrement la vis C.
5. Remplacez le cache (B) sur la poignée et vérifiez que le loquet de blocage est maintenant parfaitement engagé. (Fig. 9.9)
6. Si le loquet n'est pas complètement engagé, répétez les étapes 1 à 5.
7. Répétez la procédure de l'autre côté du fauteuil roulant.

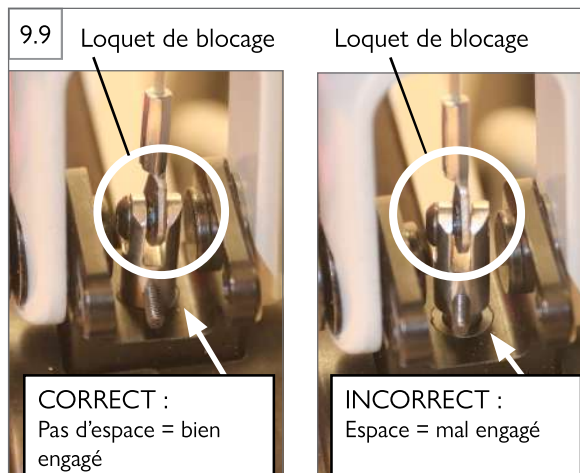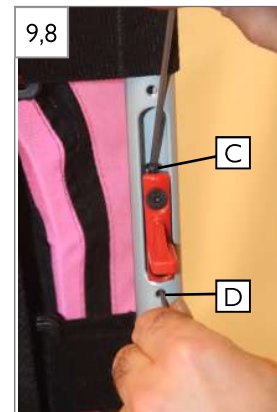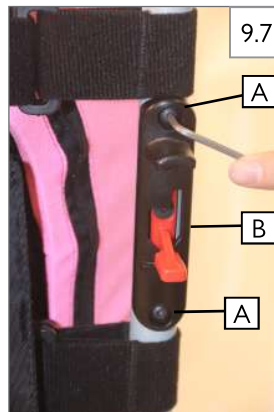

H. RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA SANGLE D'ASSISE




Réglage de la tension de la toile d'assise avant

9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16

1. Enlevez coussin du siège
2. Retirez les embouts à l'extrémité du rail du siège (A). (Fig. 9.10)
3. Commencez par un côté du fauteuil roulant. Tout en maintenant le boulon (B) à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, retirez l'écrou (D) à l'aide d'une clé de 10 mm. Sortez ensuite le boulon (B) (Fig. 9.11). Répétez la procédure de l'autre côté du fauteuil. Remarque : Si vous avez du mal à sortir le boulon (B), relâchez la tension appliquée par la toile d'assise sur le boulon. Pour cela, insérez une clé hexagonale de 6 mm dans la rainure du tube télescopique du siège (comme illustré) et faites légèrement tourner le tube vers l'extérieur. (Fig. 9.14)
4. Retirez la toile d'assise avant (C) ainsi que ses tiges. (Fig. 9.12)
5. Réglez la tension en ajustant les bandes à fermeture auto-agrippante de la toile.
6. Remplacez la toile d'assise avant et les tiges. Vérifiez que le bord de la toile d'assise et les tiges arrivent à ras des tubes télescopiques du siège. (Fig. 9.13)
7. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, faites pivoter le tube du siège vers l'extérieur de manière à aligner les trous et à pouvoir insérer les boulons (B) des deux côtés du fauteuil roulant, puis serrez les écrous (D). (Fig. 9.14) Vissez les écrous (D) au couple de 16,3 Nm [144 in-lbs] à l'aide d'une clé dynamométrique de 10 mm tout en immobilisant les boulons (B) avec une clé hexagonale standard de 4 mm. **N'utilisez pas une clé dynamométrique hexagonale de 4 mm pour éviter d'endommager la tête de la vis.**



8. Répétez les étapes 4 à 7 si vous n'avez pas obtenu la tension désirée.
9. Remplacez les embouts du rail du siège en glissant la rainure sur la toile. Tournez ensuite les embouts de sorte que la fente soit orientée vers le haut. Enfoncez à fond les embouts sur le tube télescopique du siège. (Fig. 9.15 et Fig. 9.16)

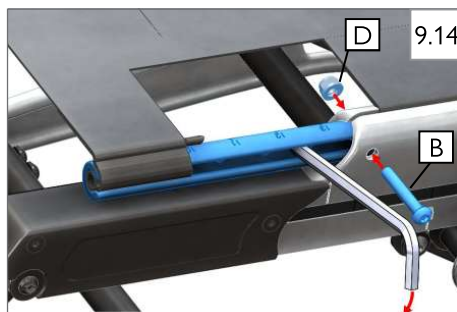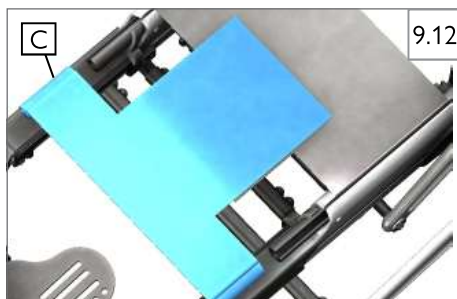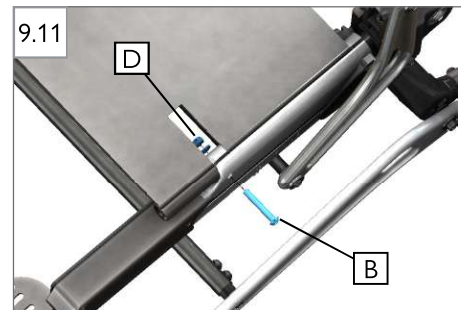









9.0 RÉGLAGES ET ENTRETIEN RÉALISÉS PAR LE DETAILLANT

Réglage de la tension de la toile d'assise arrière

1. Enlevez coussin du siège
2. Retirez la toile avant en suivant les étapes 2 à 4 de la section « Réglage de la tension de la toile d'assise avant » à la page précédente.
3. Retirez les tubes télescopiques du siège. (Fig. 9.17)
4. Retirez les boulons et écrous arrière du rail du siège externe. (Fig. 9.18)
5. Insérez l'extrémité d'une clé hexagonale de 6 mm dans l'orifice d'accès du connecteur du rail du siège arrière et faites pivoter le connecteur vers l'intérieur de sorte que la fente soit orientée vers le haut. Faites la même chose de l'autre côté du fauteuil. (Fig. 9.19)
6. Retirez la toile d'assise arrière et les tiges arrière.
7. Réglez la tension en ajustant les bandes à fermeture auto-agrippante de la toile.
8. Remplacez la toile arrière et les tiges le plus en arrière possible, jusqu'à ce que la toile d'assise repose sur la vis à tête plate et que le connecteur soit au plus bas au niveau de la cavité arrière. (Fig. 9.20, Fig. 9.21, Fig. 9.22, Fig. 9.23)
9. Resserrez le bord arrière de la toile de siège arrière :
- Le dossier doit être dans sa position la plus inclinée vers l'avant (85°) pour que l'orifice du boulon arrière soit accessible.
 - Insérez l'extrémité d'une clé hexagonale de 1/4 de pouce (ou un outil de taille similaire) dans l'orifice d'accès du connecteur du rail du siège arrière et faites pivoter le connecteur à 90° vers l'extérieur jusqu'à ce que l'orifice du boulon soit aligné avec l'orifice dans le rail du siège et les caches arrière en plastique (Figures 9.24 & 9.25).
 - Une fois les orifices alignés, insérez le boulon comme illustré à la Fig. 9.18. Procédez de la même façon de l'autre côté afin de tendre la partie arrière de la toile de siège arrière, puis insérez le boulon tout en maintenant la toile tendue, en veillant à ce que les orifices restent alignés.
- Remarque : Si la partie arrière de la toile de siège arrière n'est pas tendue, retirez la toile d'assise et ajustez la largeur de la toile grâce aux bandes à fermeture auto-agrippante. Une fois la tension de la toile de siège arrière correcte, revissez les écrous sur les boulons. (Fig. 9.18)
10. Insérez les tubes télescopiques à la profondeur adéquate. Le repère sur le cadre du siège doit être aligné avec celui du tube télescopique. (Fig. 9.26)
11. Insérez la toile d'assise avant et les tiges.
12. Faites pivoter le tube du siège vers l'extérieur de manière à aligner les trous et à pouvoir insérer les boulons des deux côtés du fauteuil roulant, puis serrez les écrous. Vissez les écrous au couple de 16,3 Nm [144 in-lbs] à l'aide d'une clé dynamométrique de 10 mm tout en immobilisant les boulons avec une clé hexagonale standard de 4 mm. **N'utilisez pas une clé dynamométrique hexagonale de 4 mm pour éviter d'endommager la tête de la vis.**



13. Remplacez les embouts du rail du siège en glissant la rainure sur la toile. Tournez ensuite les embouts de sorte que la fente soit orientée vers le haut. Enfoncez à fond les embouts sur le tube télescopique du siège. (Fig. 9.27 et Fig. 9.28)

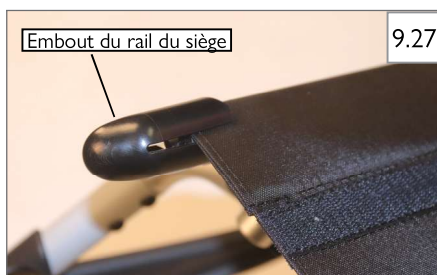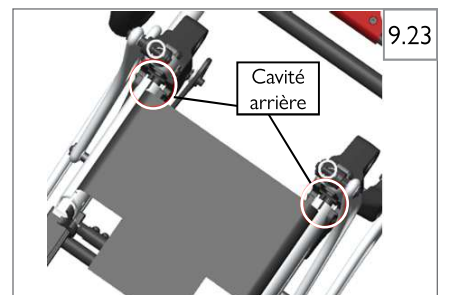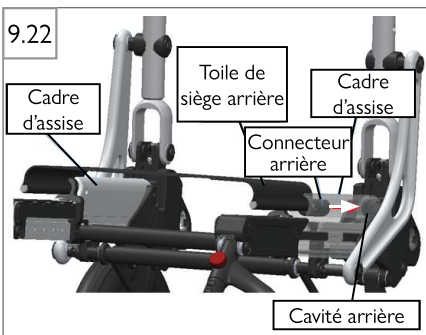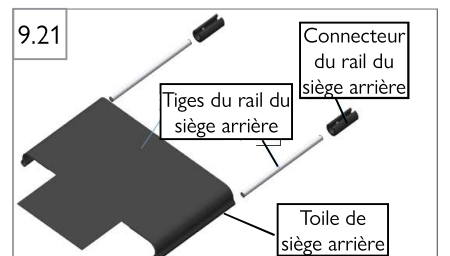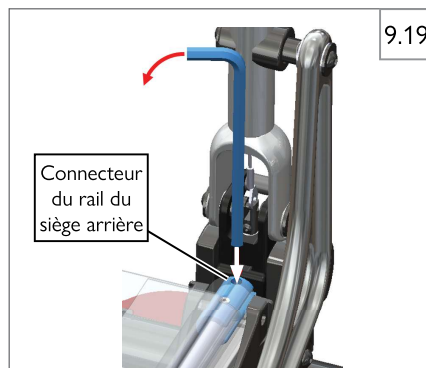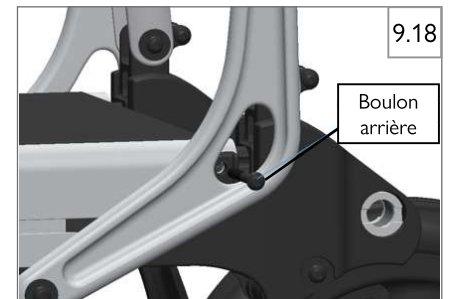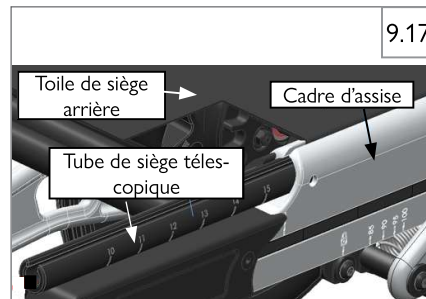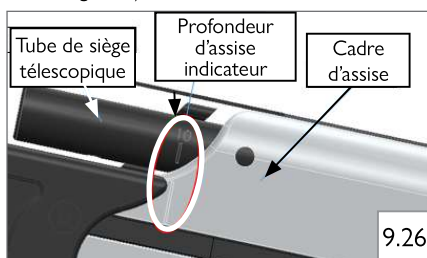

I. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE






9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36

Le réglage de la profondeur du siège nécessite de régler également la position de la toile et des tubes du siège, ainsi que du tube transversal.

1. Enlevez coussin du siège
2. Retirez les embouts à l'extrémité du rail du siège (A). (Fig. 9.29)
3. Commencez par un côté du fauteuil roulant. Tout en maintenant le boulon (B) à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, retirez l'écrou (H) à l'aide d'une clé de 10 mm. Sortez ensuite le boulon (B) (Fig. 9.30). Répétez la procédure de l'autre côté du fauteuil.
Remarque : Si vous avez du mal à sortir le boulon (B), relâchez la tension appliquée par la toile d'assise sur le boulon. Pour cela, insérez une clé hexagonale de 6 mm dans la rainure du tube télescopique du siège (comme illustré à la Fig. 9.34) et faites légèrement tourner le tube vers l'extérieur.
4. Détachez les bandes auto-agrippantes qui maintiennent ensemble la toile avant de siège et la toile arrière, puis tirez le tube télescopique (C) à la profondeur désirée en vous aidant des repères indicateurs de profondeur (D). (Fig. 9.31)
5. Vérifiez que la toile et les tiges du siège avant arrivent à ras du bord des tubes télescopiques.
6. À l'aide d'une clé hexagonale de 2 mm, desserrez les vis (E) de la selle du rail du siège (F) des deux côtés du fauteuil roulant et déplacez la selle à la valeur désirée indiquée sur le cadre externe du siège. (Fig. 9.32 et Fig. 9.33)
Si nécessaire, tapotez avec un marteau en caoutchouc sur le tube transversal supérieur pour faciliter le déplacement de la selle et/ou du tube transversal. Le bord frontal de chaque selle (F) doit être aligné avec le repère indicateur de la profondeur de siège désirée visible sur le cadre (G). Si la profondeur souhaitée est de 15 pouces ou plus, glissez les selles jusqu'au repère 15+.
7. Resserrez les vis (E) de la selle à l'aide d'une clé hexagonale de 2 mm.
8. Pivotez les tubes télescopiques vers l'extérieur pour aligner les orifices. Insérez ensuite les boulons (B) de chaque côté du fauteuil roulant et serrez-les à l'aide des écrous (H) (Fig. 9.34). Vissez les écrous (H) au couple de 16,3 Nm [144 in-lbs] à l'aide d'une clé dynamométrique de 10 mm tout en immobilisant les boulons (B) avec une clé hexagonale standard de 4 mm. **N'utilisez pas une clé dynamométrique hexagonale de 4 mm pour éviter d'endommager la tête de la vis.**



9. Replacez les embouts du rail du siège en glissant la rainure sur la toile. Tournez ensuite les embouts de sorte que la fente soit orientée vers le haut. Enfoncez à fond les embouts sur le tube télescopique du siège. (Fig. 9.35 et Fig. 9.36)
10. Le réglage de la profondeur d'assise est terminé.

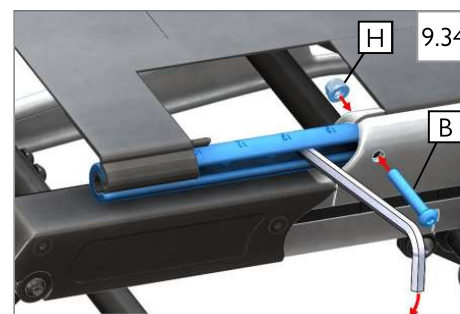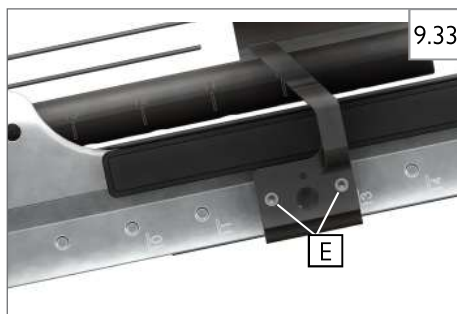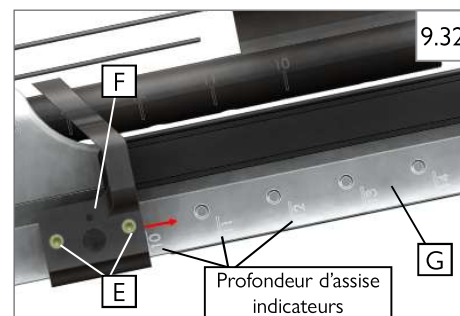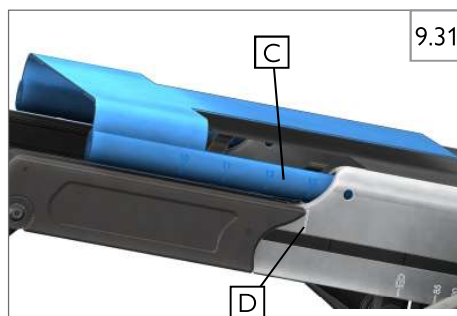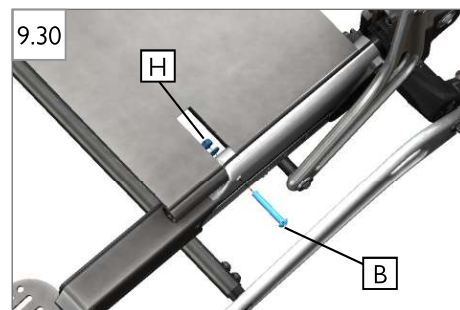

9.0 RÉGLAGES ET ENTRETIEN RÉALISÉS PAR LE DETAILLANT

J. RÉGLAGE DE L'ANGLE DE BASCULEMENT

9.37 9.38 9.39 9.40



(siège par rapport au sol)

L'angle de basculement (angle du siège par rapport au sol) peut être réglé à 10°, 20° ou 30°. (Fig. 9.42, à la page suivante)

Retrait de la goupille de basculement

1. Pour passer d'un angle de basculement de 10/20° à 30°, ou de 30° à 10/20°, retirez le butoir en caoutchouc et la tige (Fig. 9.37) à l'aide de deux clés hexagonales de 4 mm insérées dans les vis M6 à tête creuse. Peut-être devrez-vous pour cela plier légèrement le fauteuil roulant pour alléger le poids reposant sur le bouchon. Si vous souhaitez passer de 10° à 20° et de 20° à 10°, il n'est pas nécessaire de retirer le butoir.
2. Déposez le repose-jambe. Retournez le fauteuil roulant (Fig. 9.38) et démontez les roues.
3. Familiarisez-vous avec les composants du mécanisme de basculement illustrés à la Fig. 9.39.
4. En commençant d'un côté du fauteuil, retirez le boulon interne ou externe de la goupille de basculement à l'aide de deux clés hexagonales de 5 mm. Sortez ensuite la goupille de basculement en la faisant glisser hors des orifices dans le châssis. Si vous avez du mal à extraire la goupille de basculement, utilisez un marteau en caoutchouc et une clé hexagonale de 8 mm pour tapoter délicatement sur la goupille afin de la sortir (Fig. 9.40). Rangez précautionneusement les entretoises, ressorts et rondelles.
5. Répétez l'étape 4 de l'autre côté du fauteuil.

(Suite à la page suivante)

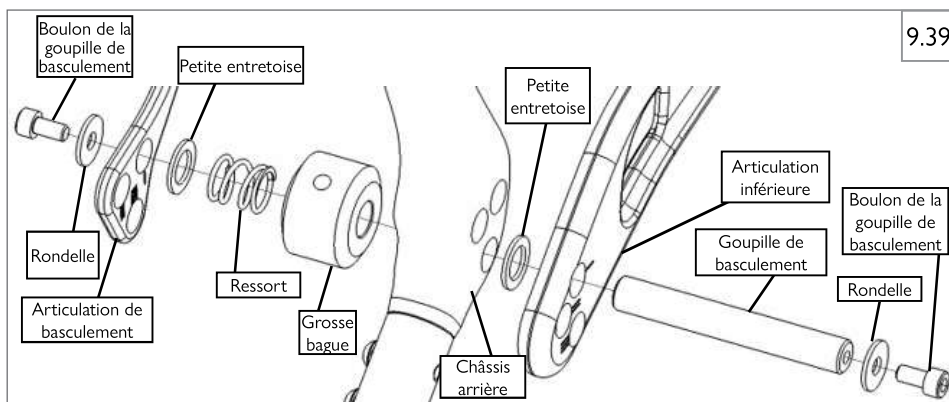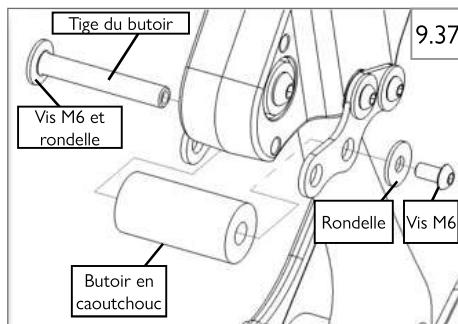









J. RÉGLAGE DE L'ANGLE DE BASCULEMENT**(siège par rapport au sol)**

9.41 9.42 9.43 9.44 9.45 9.46

(suite)

Réinsertion de la goupille de basculement

1. En commençant d'un côté du fauteuil roulant, insérez la goupille de basculement à travers les orifices correspondant au degré de basculement souhaité, comme illustré aux Figures 9.41 et 9.42. Insérez les entretoises et le ressort conformément à la vue éclatée de la Figure 9.42.
2. Ajoutez la dernière rondelle et le deuxième boulon, puis serrez les boulons au couple de 9 Nm [80 in-lbs] à l'aide de deux clés hexagonales ou de deux douilles de 5 mm. Pendant que vous serrez, vérifiez que la goupille de basculement repose correctement dans l'orifice de l'articulation de basculement. 
3. Répétez les étapes 1 et 2 de l'autre côté du fauteuil. N'effectuez les étapes 4 à 6 que si vous souhaitez passer d'un angle d'inclinaison de 10/20° à 30° ou de 30° à 10/20°. Si vous passez d'un angle de 10° à 20° ou de 20° à 10°, sautez les étapes 4 à 6, remontez les roues arrière et retournez le fauteuil roulant.
4. Remontez les roues arrière, retournez le fauteuil roulant et pliez-le partiellement (Figure 9.43). 
5. D'un côté du fauteuil roulant, insérez le butoir en caoutchouc et la tige du butoir dans les orifices appropriés de la patte arrière, conformément à la Figure 9.44. À l'aide de deux clés hexagonales de 4 mm, serrez les vis M6 à tête creuse et les rondelles au couple de 7 Nm [62 in-lbs] (voir la vue éclatée des composants à la Figure 9.37 de la page précédente).
6. Répétez l'étape 5 de l'autre côté du fauteuil. Après avoir placé les butoirs en caoutchouc, dépliez complètement le fauteuil roulant (Figure 9.45).
7. Après avoir modifié l'angle de basculement, peut-être devrez-vous ajuster également l'angle de la pédale du bloque-moyeu. À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, desserrez les vis (A) de la pédale de bloque-moyeu. Inclinez-la à l'angle désiré. Resserrez les vis jusqu'à ce que la pédale soit fermement maintenue en place (Fig. 9.46).

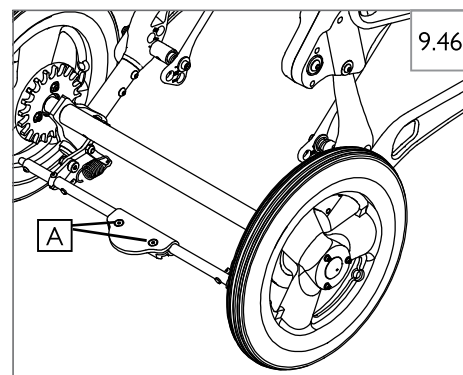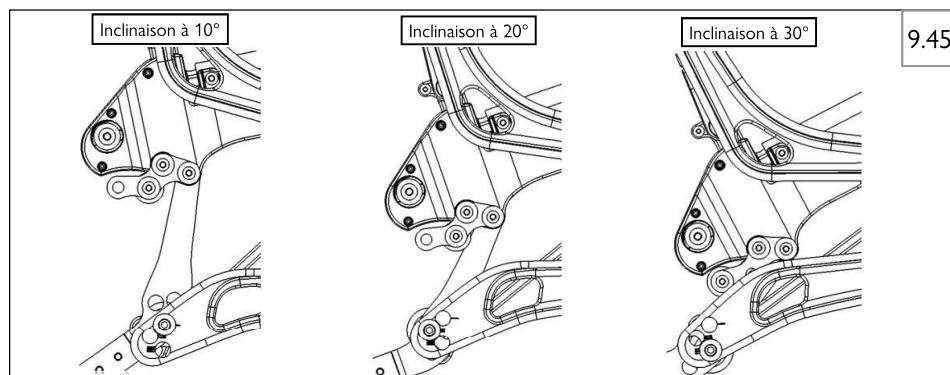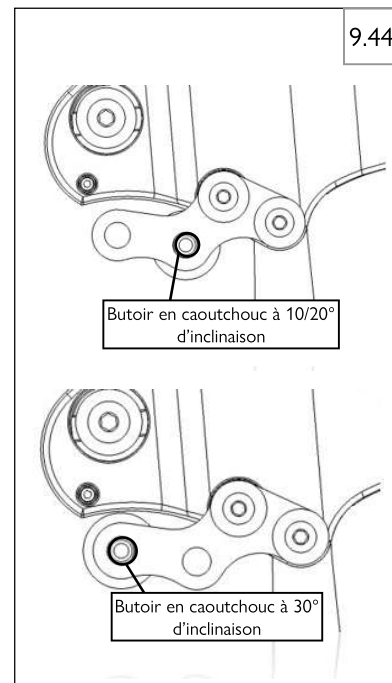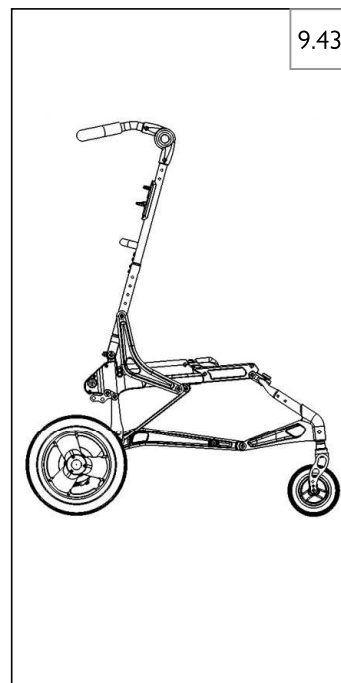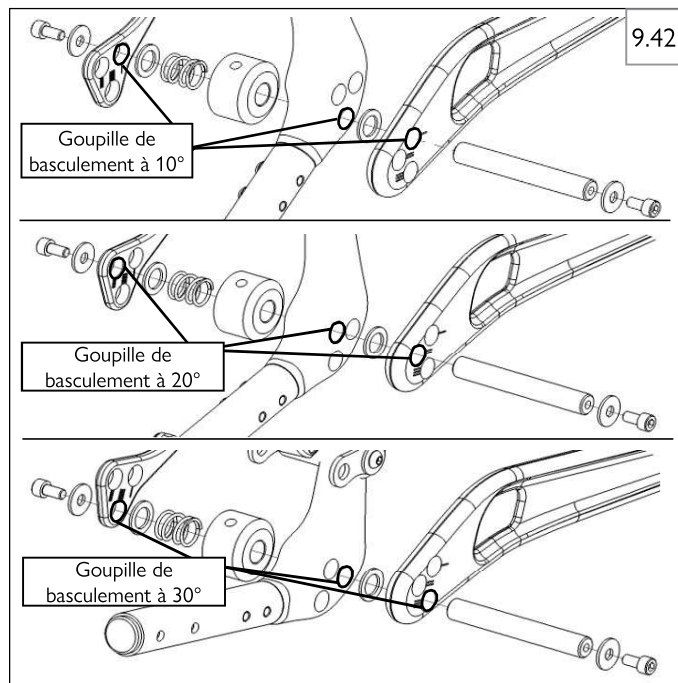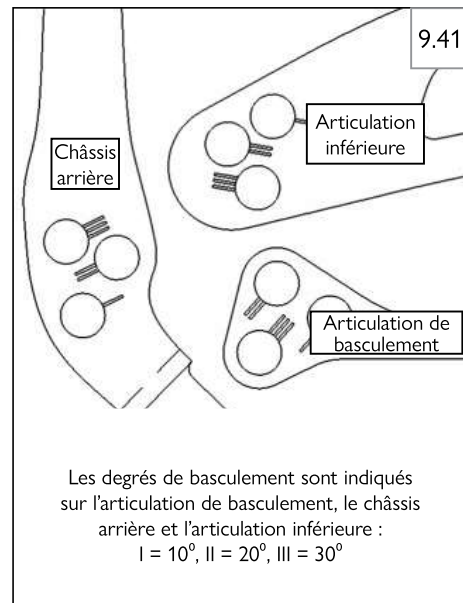

10.0 GARANTIE DE SUNRISE LIMITED

A. À VIE

Garantie du châssis et du croisillon (selon les modèles) :

1. Bien que la durée de vie anticipée de ce fauteuil roulant soit de cinq années, Sunrise Medical garantit à vie le châssis et le croisillon contre tout vice de matériau et de fabrication ou pendant aussi longtemps que l'acheteur d'origine reste le propriétaire du fauteuil.
2. Cette garantie ne s'applique pas si :
 - a. L'utilisation faite du fauteuil n'est pas conforme aux instructions fournies.
 - b. Le fauteuil n'est entretenu conformément aux consignes fournies dans le manuel d'utilisation.
 - c. Le fauteuil est cédé à un autre utilisateur.

B. PENDANT UNE (1) ANNÉE

Sunrise Medical garantit toutes les pièces et les composants de l'appareil contre tout vice de matériau et de fabrication et ce, pendant une durée d'un an à compter de la date d'achat de l'acheteur initial. Une facture, comme preuve d'achat, pourra être réclamée.

Les déclarations de sinistre et demandes de réparation sous garantie doivent être traitées par votre détaillant Sunrise Medical agréé le plus proche. Outre les garanties express décrites dans le présent document, toutes les autres garanties incluant les garanties implicites de qualité marchande et les garanties de conformité à une fin particulière, sont exclues. Aucune garantie ne s'étend au-delà des présentes dispositions. Les recours pour non-respect des garanties express décrites sont limités à la réparation ou au remplacement de la marchandise. En aucun cas, les dommages pour non-respect de la garantie ne comprendront des dommages indirects ou au dépassement de coût du matériel non conforme vendu.

C. RESTRICTIONS

1. Ne sont pas couverts par la garantie :
 - a. Les pneus et chambres à air, les toiles, les garnitures et les poignées de poussée.
 - b. Tout endommagement résultant de négligence, d'un accident, d'une utilisation inappropriée ou d'une mauvaise installation ou réparation.
 - c. Les produits modifiés sans le consentement écrit de Sunrise Medical.
 - d. Les dommages provenant du dépassement de la limite de poids.
2. Cette garantie sera nulle si la plaque signalétique, portant le numéro de série de ce fauteuil, est enlevée ou modifiée.
3. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis et au Canada. Vérifiez auprès de votre fournisseur agréé si les conditions de garantie internationales sont applicables dans votre pays.
4. La garantie n'est pas transférable et n'est valide que pour l'acheteur initial du fauteuil qui se l'est procuré auprès d'un détaillant agréé Sunrise Medical.

D. CE QUE NOUS FERONS

Notre responsabilité se limite à la réparation ou au remplacement des pièces couvertes par la garantie. Il s'agit du seul recours pour les dommages indirects.

E. PROCÉDURE POUR LE DÉTAILLANT AGRÉÉ

Obtenir l'accord de Sunrise Medical, pendant la période de validité de la garantie, avant de renvoyer ou de faire réparer les pièces couvertes par la garantie. Contacter le service après-vente pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) et l'adresse de renvoi du produit.

F. AVIS AU CONSOMMATEUR

1. Vous devez vous acquitter des frais de main-d'œuvre inhérents à la réparation, au retrait ou à l'installation des pièces, même si elles sont couvertes par la garantie.
2. Si cela est autorisé par la loi, cette garantie remplace toute autre garantie (écrite ou orale, expresse ou tacite, y compris une garantie de qualité marchande ou aptitude à une fin appropriée).
3. La présente garantie vous confère un certain nombre de droits légaux. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits susceptibles de varier d'un État ou d'une province à l'autre.

G. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES SUR LA GARANTIE POUR L'AUSTRALIE UNIQUEMENT

Les produits fournis par Sunrise Medical Pty Ltd en Australie sont garantis par Sunrise Medical. Cette garantie ne peut être exclue en vertu de la loi australienne relative à la protection des consommateurs. Vous êtes en droit de réclamer un produit de remplacement ou un remboursement en cas de problème majeur, en guise de dédommagement pour perte ou dégât raisonnablement prévisible. Vous avez droit à la réparation ou au remplacement des produits si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et si la panne n'est pas considérée comme grave. Ces garanties vous sont octroyées en sus des autres droits et recours découlant de la loi se rapportant aux produits auxquels s'applique cette garantie.

Enregistrez ici le numéro de série de votre fauteuil roulant pour référence future :

(L'étiquette du numéro de série est apposée à droite de la base, sur la plaque à galets.)

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel +41 (0)31 958 3838
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



© 2025 Sunrise Medical (US) LLC
252843 Rev. E

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Defensiedok 20
3433 NE Nieuwegein
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Sunrise Medical Canada Inc.
1000 Creditstone Rd., Unit #2
Concord, ON, L4K 4P8
Canada
Phone: 1-800-263-3390
Fax: 1-800-561-5834
www.SunriseMedical.ca