



Advance Bath Chair

Manual Del Usuario



Apoyar
a los niños



Advance Bath Chair y el Shower Trolley Leckey han sido diseñados para conseguir nuevos niveles de funcionalidad y adaptabilidad para su utilización en la bañera y en la ducha. Este manual le muestra cómo puede usar todas las funciones de forma rápida, fácil y segura. Las instrucciones sobre seguridad y mantenimiento del producto asegurarán que disfrute del uso de este producto durante mucho tiempo.

INDICE

- 01 Uso previsto
- 02 Certificación
- 03 Advertencias Y Precauciones
- 04 Términos de la garantía
- 05 Informe del historial del producto
- 06 Informe de instrucción del producto
- 07 Información sobre la seguridad
- 08 Precauciones Y Contraindicaciones
- 09 Cómo desempaquetar y montar
- 10 Configuración clínica para la gestión postural y el uso diario
- 11 Información sobre la limpieza y el cuidado
- 12 Inspección diaria del producto
- 13 Inspección anual del producto
- 14 Redistribuir productos Leckey
- 15 Reparación del producto
- 16 Información técnica

APARTADO 01: USO PREVISTO

Uso previsto

Los apoyos para el baño están destinados a ayudar a los niños y adultos jóvenes que tienen necesidades posturales de leves a complejas que interrumpen la capacidad de sentarse sin apoyo externo. Todos los dispositivos están diseñados para usarse dentro de una bañera o ducha para facilitar el cuidado personal.

Indicaciones para el uso

Advance Bath Chair se usa en el baño o la ducha si se usa con un Shower Trolley. Advance Bath Chair está destinada a niños con discapacidades de 1 a 18 años que pueden tener una falta de control del tronco o una tensión muscular excesiva debido a afecciones como Parálisis Cerebral y, o aquellos que no pueden mantenerse por sí mismos durante el proceso del baño. Advance Bath Chair tiene un peso máximo de usuario de 72 kg en todos los tamaños.

APARTADO 02: CERTIFICACIÓN

Este producto, Advance Bath Chair, está clasificado como un Dispositivo Médico de Clase I bajo las regulaciones de la UE y del Reino Unido. Como fabricante, James Leckey Design Limited, declara que este producto cumple con el Reglamento de Dispositivos Médicos (2017/745), la Normativa de Dispositivos Médicos del Reino Unido de 2002, la Directiva de Dispositivos Médicos (93/42 CEE) y la normativa EN 12182:2012 sobre Productos de apoyo para personas con discapacidad, requisitos generales y métodos de ensayo.

Aviso al usuario y/o paciente:
Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.



NOTA: Información general para el usuario.

No seguir estas instrucciones puede resultar en daños físicos, daños al producto o daños para el medio ambiente.

APARTADO 03:

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

CLAVE:

LAB = Advance Bath Chair

LSF = Shower Trolley

RAP = LAB + LSF combinados

1) ADVERTENCIA | PELIGRO DE VUELCO

- Nunca use el RAP en terrenos irregulares. Su uso previsto es para entornos de baños o cuartos húmedos.
- Nunca deje al niño desatendido mientras esté sentado en el **RAP** o **LAB**
- Compruebe siempre que el respaldo del asiento y el reposapiés estén seguros antes de que el usuario se transfiera al producto y que las correas de soporte del usuario se estén utilizando tan pronto como el usuario esté sentado.

2) PRECAUCIÓN | CONTROLES DIARIOS

- El **RAP** debe revisarse diariamente antes de su uso para asegurarse de que todos los arneses y elementos de asiento estén bien sujetos.
- Siempre lea detenidamente las instrucciones antes de usar.
- Siempre inspeccione visualmente el producto antes de usarlo. En

caso de duda, DETÉNGASE. Si sospecha o sabe que el producto o una pieza está defectuoso, DETÉNGASE. Comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente o distribuidor local lo antes posible

3) ADVERTENCIA | SEGURIDAD DEL OCUPANTE

- Antes de colocar al usuario en el producto, ajuste el producto en su orientación terapéutica y verifique su estabilidad.
- Las transferencias de usuarios dentro y fuera del producto deben realizarse con el equipo y el personal adecuado.
- Asegúrese de que el ocupante esté asegurado con los arneses del dispositivo tan pronto como sean trasladados. Se debe tener cuidado con cualquier ajuste de reclinación para los movimientos involuntarios que podrían causar un movimiento de reclinación repentino. Nunca deje al niño sin supervisión mientras esté en el **LAB** o **RAP**.
- Si el usuario presenta algún tipo de malestar, retírelo del producto lo más rápido posible de forma segura.

4) PRECAUCIÓN | LIMPIEZA

- Limpiar el producto con regularidad para evitar la acumulación de suciedad. La suciedad acumulada puede desgastar prematuramente las molduras del asiento y fomentar la corrosión en el bastidor. Utilice únicamente limpiadores domésticos no abrasivos y paños húmedos.

5) PRECAUCIÓN | LIMPIEZA CON LIMPIADORAS A PRESIÓN O MANGUERAS ELÉCTRICAS

- No use mangueras ni limpiadoras a presión eléctricas en los componentes del bastidor ya que no está sellado contra el agua corriente y puede dañarse con la entrada de agua.

6) PRECAUCIÓN | ALMACENAMIENTO

- El producto debe mantenerse alejado de todas las fuentes directas de calor, incluidas llamas desnudas, cigarrillos, calentadores eléctricos y de gas.

7) PRECAUCIÓN | PUESTA EN USO

- Cuando ponga el **LAB** en uso después de estar almacenado, primero permita que se aclimate a la temperatura ambiente para evitar la incomodidad del metal frío en la piel desnuda del usuario.

8) PRECAUCIÓN | ELIMINACIÓN

- Solo deseche el RAP en un sitio de eliminación de desechos de la comunidad bajo la categoría de reciclaje correcto.

APARTADO 04: TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía se aplica únicamente cuando el producto se utiliza de acuerdo a las condiciones especificadas y para los usos previstos, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante (vea también los términos generales de venta, entrega y pago). Se proporciona una garantía de tres años en todos los productos y componentes fabricados por Leckey.

APARTADO 05: INFORME DEL HISTORIAL DEL PRODUCTO

Su producto Leckey está clasificado como un aparato médico de Clase 1 y, como tal, sólo se debería prescribir, instalar o redistribuir para su uso por un técnico competente que haya sido entrenado en el uso de este producto. Leckey recomienda que se mantenga un informe por escrito para proporcionar detalles de todos los ajustes, inspecciones de redistribución e inspecciones anuales de este producto.

APARTADO 06: INFORME DE INSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

(PADRES, PROFESORES Y CUIDADORES)

Su producto Leckey es un aparato médico de Clase 1 prescrito y, como tal, Leckey recomienda que los padres, profesores y cuidadores que utilicen el equipo debieran ser concienciados de las siguientes secciones de este manual de usuario por un técnico competente:

Apartado 7

Información sobre la seguridad

Apartado 10

Configuración clínica para la gestión postural y el uso diario

Apartado 12

Inspección diaria del producto

Leckey recomienda que se mantenga un registro por escrito de todos aquellos que han sido entrenados en el uso correcto de este producto.

APARTADO 07: INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

1. Lea siempre las instrucciones por completo antes de usarlo.
2. No se debe dejar a los usuarios desatendidos en ningún momento mientras usan un equipo de Leckey.
3. Use únicamente componentes aprobados por Leckey. No modifique el artículo de ninguna forma. Si no sigue las instrucciones, podría hacer que el usuario o el cuidador corran riesgo e invalidaría la garantía del producto.
4. Si tiene alguna duda sobre el uso seguro continuado de su producto Leckey o si alguna pieza falla, por favor, deje de usar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente o con su distribuidor local tan pronto como sea posible.
5. Lleve a cabo todos los ajustes de posición y asegúrese de que están sujetos con seguridad antes de colocar al usuario en el producto.
6. El peso límite en los cuatro tamaños de asientos es de 72 Kg. Esto no debería excederse NUNCA.
7. Con la excepción del ajuste de inclinación del respaldo, el asiento de baño de avance no debería ajustarse mientras el usuario está en él. Si está ajustando la inclinación del respaldo con un usuario en el asiento, asegúrese mientras levanta la palanca de que el respaldo de la silla está seguro sujetando los manillares de la parte superior de la estructura del asiento de baño.
8. Cuando esté ajustando la Advance Bath Chair en cualquier posición, asegúrese de que el pasador de bloqueo está completamente enganchado.
9. Le recomendamos que cuando el Shower Trolley esté parado, las cuatro ruedas estén bloqueadas y mirando hacia fuera con respecto a la base del carrito.
10. Aunque la movilidad es una característica importante de este producto, no recomendamos que se mueva a los usuarios sobre superficies desiguales mientras están en el equipo. Hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención, si se transporta al usuario en la Shower Trolley de una habitación a otra.

11. No deje nunca el producto en una superficie inclinada, con una inclinación de más de 5 grados. Recuerde siempre bloquear todas las ruedas.
12. Si está moviendo su Shower Trolley de una habitación a otra, por favor, diríjalo agarrando los manillares de la parte superior del respaldo.
13. Los productos Leckey cumplen con las normas de seguridad de incendios de acuerdo con la EN12182. Sin embargo, el producto contiene componentes de plástico y, por tanto, debería mantenerse alejado de todas las fuentes de calor directas incluyendo llamas al descubierto, cigarros y calentadores eléctricos o de gas.
14. Limpie el producto regularmente. No use productos de limpieza abrasivos. Lleve a cabo pruebas de mantenimiento con regularidad para asegurarse de que su producto está en buenas condiciones de funcionamiento.

APARTADO 08:

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Precauciones

- Deformidades de la columna fija como escoliosis o cifosis
- Contracturas musculares graves
- Asimetría muscular o esquelética severa, incluida la dislocación de la cadera
- Condiciones progresivas y de desgaste muscular
- Alto riesgo o antecedentes recientes de fracturas óseas
- Alto riesgo de lesiones relacionadas con la presión o llagas abiertas
- Patrones de movimiento fuertes e incontrolados
- Actividad convulsiva mal controlada
- Niños que dependen del uso de gastrostomía endoscópica percutánea
- Inestabilidad médica, incluida la función respiratoria o cardiovascular comprometida
- Niños que dependen de aparatos de soporte vital de terceros, como tanques de oxígeno

- Discapacidades de aprendizaje significativas y, o problemas de comportamiento.

Contraindicaciones

No existen contraindicaciones asociadas con los dispositivos de baño. Las instrucciones de uso indican, que para todos los productos, ningún niño o adulto joven debe dejarse desatendidos en el dispositivo cuando esté en uso o en contacto con el agua.

Todas las precauciones y contraindicaciones se toman a discreción de los padres o del médico que prescribe.

APARTADO 09: CÓMO DESEMPAQUETAR Y MONTAR


Enhorabuena por comprar su Silla de baño Leckey. Su Silla de baño vendrá envuelta en plástico de burbujas, empaquetada para su montaje y sin la funda sujeta. Su Silla de baño Leckey vendrá con un cinturón para la cadera ya fijado y con un cinturón para el pecho con soportes laterales.

También se incluirán las correas adicionales que se hayan pedido. Sáquelas con cuidado y compruebe que tiene todas las piezas que pidió, por favor.



9.1 FIJAR LA FUNDA

Para fijar la funda, ponga Advance Bath Chair con el soporte para las pantorrillas en la posición máxima, como indicado. Luego, deslice primero la funda sobre el respaldo y después el soporte para las pantorrillas. Después, enrolle las correas a través de la estructura asegurando el tejido bajo la base del asiento como indicado.

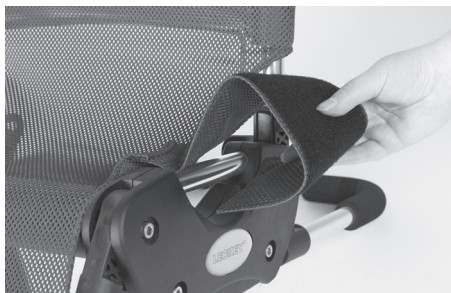


9.2 FIJAR EL CINTURÓN PARA LA CADERA

El cinturón para la cadera se sujeta alrededor del usuario simplemente con Velcro.




9.3 FIJAR EL CINTURÓN PARA EL PECHO

Para fijar el cinturón del pecho, páselo alrededor del respaldo del asiento y sujételo con el Velcro por delante del usuario.

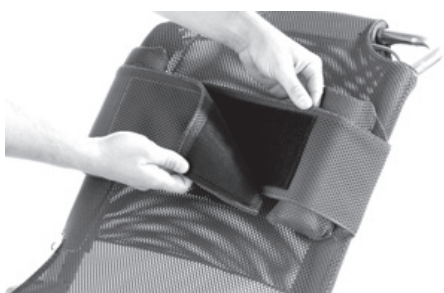

9.4 FIJAR LA CORREA DE SEPARACIÓN

Para fijar la correa de separación, simplemente pásela alrededor de la estructura tubular y asegúrela atrás con el Velcro.

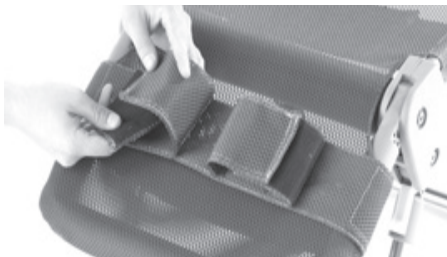

9.5 FIJAR LOS LATERALES DEL CABECERO

Los laterales del cabecero se sujetan de la misma forma simplemente pasándolos alrededor de la estructura tubular y sujetándolos en la parte de atrás con Velcro.



9.6 FIJAR ADVANCE BATH CHAIR AL SHOWER TROLLEY

El Shower Trolley permitirá convertir de forma simple su Advance Bath Chair en una silla de ducha. Para fijar Advance Bath Chair Leckey al Shower Trolley, simplemente cambie la longitud de la estructura para que se corresponda con la posición ajustada de las patas en Advance Bath Chair Leckey.

Esto se hace aflojando los pernos y ajustando la barra a la posición requerida. Una vez que esté en posición, vuelva a apretar los pernos con fuerza. Luego, simplemente deje caer las patas de adelante y de atrás de Advance Bath Chair Leckey en los canales como se muestra, sujetando las correas de Velcro son seguridad alrededor de los tubos de las patas



APARTADO 10: CONFIGURACIÓN CLÍNICA PARA LA GESTIÓN POSTURAL Y EL USO DIARIO



La configuración clínica del producto debería ser llevada a cabo por una persona con experiencia técnica y clínica que haya sido entrenado en el uso del producto. Leckey recomienda que se mantenga un registro por escrito de todas las configuraciones clínicas para este producto.


A los padres y los cuidadores se les debería mostrar cómo hacer ajustes frecuentes y una persona con experiencia técnica y clínica que haya sido entrenada en el uso del producto debería darles a conocer las comprobaciones de seguridad en la Sección 7. Leckey recomienda mantener un registro por escrito de todos los padres y cuidadores que hayan sido entrenados en el uso de este producto.

10.1 AJUSTE DE LA ALTURA

Advance Bath Chair Leckey puede ajustarse en altura para permitir una gama de posiciones, desde horizontal en el baño hasta por encima de la altura de baño. La altura se ajusta tirando hacia abajo de los dos grupos de palancas y ajustando las patas anteriores y posteriores a la posición requerida. Una vez que se ha obtenido la posición, simplemente libere las palancas.



Por razones de estabilidad, no recomendamos que ambos grupos de patas se ajusten a su posición más alta al mismo tiempo. Cuando esté ajustando Advance Bath Chair a cualquier posición, por favor, asegúrese de que la clavija de bloqueo está completamente enganchada.

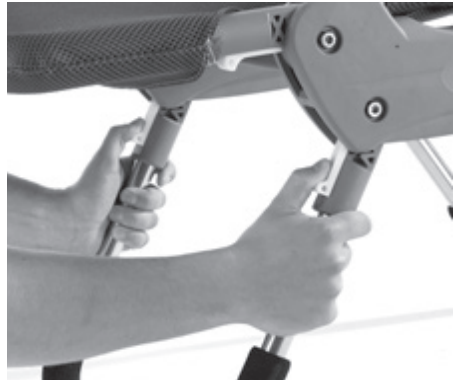

10.2 ESPACIO DE RECLINACIÓN

El ajuste de la altura independiente de las patas anteriores y posteriores de Advance Bath Chair permite que la silla se ajuste para una variedad de posiciones de reclinación. Estos ajustes se llevan a cabo exactamente de la misma forma que el ajuste de la altura descrito arriba.



Compruebe siempre con su terapeuta que el uso del espacio de reclinación no provocará obstrucciones a las vías respiratorias del niño.



10.3 AJUSTE DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO

La reclinación del respaldo de Advance Bath Chair Leckey puede ajustarse a cuatro posiciones desde horizontal a 90 grados. La reclinación del respaldo se ajusta tirando de la palanca, moviéndolo a la posición requerida y, después, liberando la palanca, asegurándose de que se coloca de nuevo en su posición.



Cuando esté ajustando Advance Bath Chair a cualquier posición, por favor, asegúrese de que la clavija de bloqueo está completamente enganchada.



10.4 AJUSTE DEL SOPORTE DE LAS PANTORRILLAS

El soporte de las pantorrillas puede ajustarse en cuatro posiciones tirando hacia abajo de las palancas, poniéndolo en la posición requerida y después soltando la palanca a su posición.



10.5 AJUSTE DEL CINTURÓN DEL PECHO

Coloque las almohadillas de espuma bajo las axilas del usuario, mientras que pasa la correa alrededor de la parte de atrás de la estructura y asegúrelas con Velcro en la parte frontal como se muestra. Los soportes laterales también pueden colocarse en la parte de atrás de la silla, si el usuario no necesita este nivel de soporte.



10.6 AJUSTE DE LA CORREA DE ABDUCCIÓN

Una vez que la correa de abducción ha sido fijada, entonces se colocan las patas y se aseguran con las correas de Velcro más pequeñas.

APARTADO 11 INFORMACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA Y EL CUIDADO

Cómo limpiar

Cuando limpie, le recomendamos que use solo agua templada y un detergente no abrasivo. No use nunca disolventes orgánicos o líquidos de limpieza en seco.

Tapizado y tejido

La funda de Advance Bath Chair puede quitarse y lavarse a máquina a 60 grados.

Los accesorios de Advance Bath Chair pueden limpiarse a mano mientras están colocados en su sitio. Cuando los limpie, le recomendamos que utilice únicamente agua templada y un detergente no abrasivo.

Le recomendamos que no utilice ningún tipo de medicamento en el agua durante el baño ya que esto podría contribuir a la ruptura del pegamento utilizado para unir la moldura a la pata de acero inoxidable.

Asegúrese siempre de que el producto está seco antes de utilizarlo.

1. Para la limpieza diaria se puede usar jabón y agua o spray antibacteriano.
2. Para una limpieza más profunda se puede usar vapor a presión.
3. No utilice disolventes para limpiar los componentes metálicos o plásticos.
4. Asegúrese de que el producto está seco antes de usar.

APARTADO 12 INSPECCIONES DIARIAS DEL PRODUCTO

(Terapeutas, padres y cuidadores)

Le recomendamos que los terapeutas, padres o cuidadores lleven a cabo comprobaciones visuales diarias del equipo para asegurarse de que es seguro usar el producto. Las comprobaciones diarias recomendadas se detallan más abajo.

1. Asegúrese de que todas las manijas de ajuste están en su sitio y apretados.
2. Revise el tapizado y el Velcro buscando señales de desgaste o desgarre.
3. Asegúrese de que las ruedas se mueven sin problema y de que se bloquean con seguridad.



Si tiene alguna duda sobre el uso seguro continuado de su producto Leckey o si falla cualquier pieza, por favor, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente o su proveedor local tan pronto como sea posible.

APARTADO 13 INSPECCIÓN ANNUAL DEL PRODUCTO

(Terapeuta, técnico, asesor de productos Leckey, distribuidor)

Leckey recomienda que cada producto se someta a una inspección detallada al menos una vez al año y cada vez que el producto se redistribuya para su uso. La inspección debería ser llevada a cabo por una persona con experiencia técnica que haya recibido formación en el uso del producto y debería incluir las siguientes revisiones como requisito mínimo.

1. Comprobar que todas las manijas, tuercas, pernos y hebillas de plástico están en su sitio, sustituyendo cualquier elemento que se haya perdido. Prestar especial atención a los siguientes elementos;
2. Levante la base para revisar cada rueda individualmente. Asegúrese de que se mueven sin problema y retire cualquier suciedad de las ruedas de goma. Compruebe que los frenos bloquean bien las ruedas.
3. Revise visualmente la estructura del producto prestando atención a los puntos de soldadura del armazón y asegurándose de

que no hay señales de fatiga o de fisuras alrededor de las soldaduras.

4. Leckey recomienda que se mantenga un informe escrito de todas las inspecciones anuales del producto.



Si tiene alguna duda sobre el uso seguro continuado de su producto Leckey o si falla cualquier pieza, por favor, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente o su proveedor local tan pronto como sea posible.

APARTADO 14

REDISTRIBUIR PRODUCTOS LECKEY

La mayoría de los productos Leckey son evaluados y pedidos para atender las necesidades de un usuario individual. Antes de redistribuir un producto, le recomendamos que el terapeuta que le prescribe el producto haya llevado a cabo una comprobación de compatibilidad del equipo para el nuevo usuario y que se haya asegurado de que el producto que se está redistribuyendo no contiene modificaciones o accesorios especiales.

Debería llevarse a cabo una inspección técnica en el producto antes de redistribuirlo. Esta debería ser llevada a cabo por un técnico competente que haya sido entrenado en el uso e inspección del producto. Por favor, refiérase al apartado 13 para conocer las comprobaciones requeridas que deben realizarse.

Antes de volver a poner en circulación un producto, se recomienda desinfectarlo mediante uno de los siguientes procedimientos:

Nota:

Limpie siempre el producto en primer lugar para eliminar la suciedad acumulada antes de desinfectarlo/sanearlo.

- Siempre que sea posible, se recomienda el uso de un sistema

de desinfección automatizado que se utiliza para cubrir completamente las superficies del producto con un agente desinfectante. Antes del uso del sistema elegido deben consultarse y seguirse las instrucciones del fabricante al pie de la letra.

- Cuando no se disponga de un sistema de desinfección automatizado, todas las superficies del producto deberán limpiarse con toallitas desinfectantes para superficies o con un desinfectante líquido en un paño suave. Los productos adecuados son IPA al 70%, alcohol al 70% o lejía diluida. Deben seguirse las instrucciones del fabricante del producto elegido. La tapicería y los componentes de tela del producto deben limpiarse a fondo de acuerdo con la sección de Información sobre limpieza y cuidado, de este manual.

Asegúrese de que se proporciona una copia del manual del usuario con el producto. Se puede descargar una copia en nuestra página web **www.leckey.com**. Leckey recomienda que se mantenga un informe escrito de todas las inspecciones del producto llevadas a cabo durante la redistribución del producto.

APARTADO 15 REPARACIÓN DEL PRODUCTO

La reparación de todos los productos Leckey solo debería llevarse a cabo por personas con experiencia técnica que hayan sido entrenados en el uso del producto.

En el Reino Unido e Irlanda, por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio de Leckey, en el Reino Unido 0800 318265 o en Irlanda 1800 626020, y nuestro departamento de servicio al cliente estará encantado de ayudarle con sus requisitos de reparación.



Todas las consultas sobre reparación internacionales deberían dirigirse al distribuidor Leckey apropiado, quien estará encantado de ayudarle. Para más información sobre los distribuidores de Leckey, por favor, visite nuestra página web **www.leckey.com**.

APARTADO 16

INFORMACIÓN TÉCNICA

Medidas del producto				
Tamaño	1	2	3	4
Edad	1-5	4-9	8-14	12-18
Altura del usuario				
Min	750mm / 30 inches	950mm / 37 inches	1150mm / 45 inches	1350mm / 53 inches
Max	1050mm / 41 inches	1250mm / 49 inches	1450mm / 57 inches	1650mm / 65 inches
Advance Bath Chair	LAB/1	LAB/2	LAB/3	LAB/4
Cabecero	150mm / 6 inches	150mm / 6 inches	215mm / 8.5 inches	215mm / 8.5 inches
Respaldo	350mm / 14 inches	400mm / 16 inches	460mm / 18 inches	550mm / 22 inches
Profundidad del asiento	225mm / 9 inches	275mm / 11 inches	335mm / 13 inches	400mm / 16 inches
Soporte par alas pantorrillas	260mm / 10 inches	260mm / 13 inches	340mm / 13 inches	340mm / 13 inches
Altura del asiento _50-425mm 2-17"				
Peso max _72KG 159 pounds				
Antura total _430mm 17"				
Shower Trolley	LSF/1			
Anchura	600mm / 24 inches			
Longitud				
Min	900mm / 36 inches			
Max	1150mm / 45 inches			
Altura del asiento desde el suelo _650-700mm 26" - 28"				

TABLA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
	Dispositivo médico
	Lea las instrucciones de uso
	Marcaje CE
	Advertencia
	Fabricante
	Número de modelo
	Número de serie
	Peso máx. de ocupación
	Fecha de fabricación
	Para uso en interiores solamente

Símbolo	Significado
	No contiene látex
	Identificación única del dispositivo
	Lavado a máquina - temperatura del agua 50°C
	Secar en secadora a baja temperatura
	Planchado en frío
	No lavar en seco

[illegible]

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

**Distribuidor Español**

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya
España

www.sunrisemedical.es

T: 902 14 24 34 / 94 633 31 92

F: 94 648 15 75

Distribuidor de EE. UU.

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122

www.sunrisemedical.com

T: 1-800-333-4000

F: 1-800-300-7502

E: customseating@sunmed.com

James Leckey Design Limited

19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

[+44] 28 9260 0750
hello@leckey.com

leckey.com



LS991-03